

INSTRUÇÕES DE USO

NOME COMERCIAL: CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO PARA COLUNA PRIME R3A

Nome Técnico: Cânulas

ANVISA nº 80989259019

Fabricante:

R3A Medical Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

Endereço: Av. Antonio Martinez Carrera Filho, 72 – CEAT CEP 13.573-420 – São Carlos – SP.

CNPJ: 14.697.578/0001-53 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Telefone: (16) 36007560

E-mail: contato@r3amedical.com

Responsável Técnico: Lígia Archiza Plaine – CRF/SP 88541

– PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO (ETO) –
– PROIBIDO REPROCESSAR –



Antes da utilização do produto, o usuário deve ler atentamente as instruções de uso, as quais irão auxiliar o uso correto e seguro, protegendo contra possíveis riscos.

INDICAÇÃO DE USO

A CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO PARA COLUNA PRIME R3A auxilia o cirurgião durante o procedimento de preparação para cirurgia de artroscopia. Deve ser utilizada de acordo com o protocolo médico escolhido. Tem como função a debridação, corte e raspagem de tecidos moles, ósseos e cartilagosos.

FORMA DE APRESENTAÇÃO

A CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO PARA COLUNA PRIME R3A é comercializada de forma unitária.

Os materiais que compõem o produto são: aço inoxidável e alumínio.



Janela de corte: BAP / BD / BR / CMA / INC / BA

Diâmetros: 4,5 / 5,0 mm

Comprimentos: 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310 / 320 / 330 / 340 / 350 / 360 mm

Encaixes: R / A / F / T / L / E / P / K / W / J

FINALIDADE

A Cânula de Debridação para Coluna Prime R3A possui a função de realizar a debridação de tecidos moles, cartilagosos e ósseos em procedimentos cirúrgicos artroscópicos da coluna.

Destina-se aos médicos cirurgiões devidamente qualificados, familiarizados e treinados com o produto e com a técnica e/ou procedimento cirúrgico escolhido.

ESTERILIZAÇÃO

O dispositivo médico é fornecido ESTÉRIL. O método de esterilização utilizado é ETO (Óxido de Etileno), em concordância com a norma ABNT NBR ISO 11135, possuindo validade de 2 anos a partir da data de esterilização, caso a embalagem não esteja violada.

RECOMENDADO USO ÚNICO

O fabricante recomenda o USO ÚNICO do produto, não sendo aconselhável reprocessar, reesterilizar ou reutilizar os instrumentos, o que pode causar danos ao paciente. Seu descarte é feito em LIXO HOSPITALAR, conforme legislação sanitária vigente.

MODO DE UTILIZAÇÃO

1. Verificar se a embalagem não está danificada;
2. Verificar se a indicação da esterilização está correta e seu prazo de validade;
3. Abrir a caixa de embalagem e retirar o blister selado;
4. A embalagem do instrumental estéril deverá ser aberta dentro do centro cirúrgico, seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, por profissionais qualificados, para que não haja riscos de contaminação;
5. Inserir a cânula selecionada no motor adequado até que haja o encaixe completo;
6. Ajustar a rotação adequada do equipamento;
7. Utilizar conforme protocolo médico escolhido;
8. Após o procedimento, retirar a cânula do motor e inutilizar e descartar o produto em LIXO HOSPITALAR, conforme legislação sanitária vigente.

VALIDADE

O prazo de validade do dispositivo médico é de 2 anos após a data de esterilização.

APÓS ABERTO, UTILIZAR IMEDIATAMENTE.

ADVERTÊNCIAS

- Não utilize caso a embalagem estiver rasgada, furada, danificada ou violada. A esterilidade não é válida se a embalagem protetora estiver violada.
- Não utilizar produtos fora da data de validade.
- O produto deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados e familiarizados com a técnica cirúrgica.
- As lâminas possuem melhor desempenho de corte em velocidades abaixo de 3000 RPM. Não é recomendado operar lâminas em velocidade maior que 6000 RPM.
- Não instalar ou remover as lâminas enquanto o motor da peça de mão estiver em funcionamento.
- O fabricante recomenda o USO ÚNICO do produto, não sendo aconselhável reprocessar, reesterilizar ou reutilizar os instrumentos, o que pode causar danos ao paciente. Seu descarte é feito em LIXO HOSPITALAR, conforme legislação sanitária vigente.

PRECAUÇÕES

- Verificar a integridade dos instrumentos antes do uso, atentando para possíveis danos mecânicos (amasso, quebra ou sinuosidade). Se o produto apresentar algum dano, o mesmo deverá ser inutilizado.
- Evitar esforços excessivos durante o procedimento cirúrgico para não danificar os instrumentais.
- Manusear os instrumentais com cuidado evitando perfurações nas luvas cirúrgicas.
- As lâminas devem ser periodicamente irrigadas para que não haja o acúmulo excessivo de tecidos.

CONTRAINDICAÇÕES

Utilização em pacientes que tenham alergia a algum dos materiais que compõem o dispositivo médico.

Não é recomendado o uso do produto em regiões com infecção ativa.

INSTRUÇÕES DE USO: CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO PARA COLUNA PRIME R3A - Revisão 03 de 20/05/2025

EVENTOS ADVERSOS

Não aplicável.

ARMAZENAMENTO

- O transporte da embalagem contendo o produto deve ser feita com cuidado e armazenada em local seco, arejado e ao abrigo da luz;
- O produto deve ser mantido em embalagem original até o momento de sua utilização, sendo armazenado em local limpo, fresco, seco e longe de substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas;
- Não utilize caso a embalagem estiver rasgada, furada, danificada ou violada. A esterilidade não é válida se a embalagem protetora estiver violada;
- Não coloque sob pesos ou volumes, pois poderão danificar e comprometer a integridade e/ou qualidade do produto;
- Temperatura de 10 °C a 35 °C / Umidade Relativa de 30% a 75% (sem condensação).

TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado e acondicionado de forma a protegê-lo contra qualquer intempérie;
- A embalagem não deve estar furada, rasgada ou com algum tipo de dano, o que pode comprometer a integridade e qualidade do produto. Deve ser armazenada ao abrigo da luz, umidade, calor e sujidades;
- Não coloque sob pesos ou volumes, pois poderão danificar e comprometer a integridade e/ou qualidade do produto;
- Temperatura de 10 °C a 35 °C / Umidade Relativa de 30% a 75% (sem condensação).

DESCARTE

- Inutilizar e descartar o produto caso sua integridade tenha sido comprometida, durante o transporte, armazenamento e/ou manuseio inadequados.
- Inutilizar caso a embalagem estiver violada ou fora do prazo de validade, pois a esterilidade não será válida.

- Inutilizar após realização do procedimento médico escolhido. PRODUTO DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

DESCARTAR O PRODUTO CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA LOCAL.

RASTREABILIDADE

O produto contém em sua etiqueta de rótulo e nas etiquetas de rastreabilidade que acompanham o produto todas as informações necessárias e requeridas que irão possibilitar sua rastreabilidade, caso seja necessário.

GARANTIA

A R3A Medical oferece a garantia de seus produtos por 6 meses, contra defeitos de fabricação. Essa garantia NÃO cobre defeitos que surjam devido ao transporte, armazenamento e/ou manipulação inadequados.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Caso o produto médico esteja fora de suas especificações descritas nesta instrução de uso e/ou esteja gerando quaisquer insatisfações, notifique diretamente a R3A Medical. Identifique e descreva a não conformidade para: Av. Antonio Martinez Carrera Filho, 72 – CEAT CEP 13.573-420 – São Carlos – SP, telefone – (16) 36007560, e-mail: contato@r3amedical.com.

MODELOS E CÓDIGOS COMERCIAIS

Código	Descrição	Dimensões
052.0001	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0002	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0003	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0004	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0005	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0006	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0007	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0008	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0009	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0010	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0011	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0012	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm

INSTRUÇÕES DE USO: CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO PARA COLUNA PRIME R3A - Revisão 03 de 20/05/2025

052.0101	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0102	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0103	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0104	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0105	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0106	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0107	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0108	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0109	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0110	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0111	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0112	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0113	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0114	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0115	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0116	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0117	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0118	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0119	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0120	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0121	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0122	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0123	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0124	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0125	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0126	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0127	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0128	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0129	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0130	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0131	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0132	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0133	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0134	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0135	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0136	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0137	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0138	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0139	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0140	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0141	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0142	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0143	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0144	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm

052.0233	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0234	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0235	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0236	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0237	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0238	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0239	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0240	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0241	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0242	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0243	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0244	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0245	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0246	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0247	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0248	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0249	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0250	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0251	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0252	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0253	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0254	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0255	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0256	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0257	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0258	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0259	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0260	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0261	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0262	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0263	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0264	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0265	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0266	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0267	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0268	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0269	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0270	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0271	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0272	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0273	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0274	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0275	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0276	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm

052.0365	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0366	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0367	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0368	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0369	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0370	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0371	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0372	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0373	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0374	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0375	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0376	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0377	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0378	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0379	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0380	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0381	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0382	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0383	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0384	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0385	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0386	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0387	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0388	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0389	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0390	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe F	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0391	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0392	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0393	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0394	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0395	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0396	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0397	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0398	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0399	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0400	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0401	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0402	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0403	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0404	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0405	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0406	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0407	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0408	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm

052.0497	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0498	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0499	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0500	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0501	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0502	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0503	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0504	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0505	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0506	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0507	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0508	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0509	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0510	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0511	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0512	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0513	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0514	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0515	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0516	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0517	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0518	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0519	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe T	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0520	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe T	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0521	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0522	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0523	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0524	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0525	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0526	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0527	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0528	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0529	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0530	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0531	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0532	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0533	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0534	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0535	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0536	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0537	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0538	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0539	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0540	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm

052.0629	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0630	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.0631	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0632	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0633	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0634	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0635	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0636	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0637	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0638	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0639	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0640	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0641	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0642	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0643	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0644	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0645	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0646	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0647	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0648	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0649	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0650	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe L	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0651	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0652	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0653	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0654	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0655	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0656	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0657	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0658	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0659	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0660	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0661	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0662	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0663	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0664	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0665	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0666	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0667	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0668	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0669	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0670	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0671	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.0672	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 260mm

052.0761	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0762	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0763	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0764	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0765	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0766	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0767	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0768	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0769	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0770	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0771	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0772	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0773	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0774	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0775	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0776	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0777	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0778	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0779	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0780	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe E	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0781	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0782	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0783	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0784	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0785	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0786	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0787	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0788	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0789	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0790	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0791	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0792	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0793	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0794	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0795	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0796	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0797	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0798	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0799	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0800	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0801	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.0802	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.0803	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.0804	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 260mm

052.0893	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0894	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0895	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0896	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0897	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0898	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0899	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0900	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.0901	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0902	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0903	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0904	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0905	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0906	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0907	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0908	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0909	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe P	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0910	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe P	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.0911	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0912	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0913	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0914	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0915	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0916	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0917	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0918	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0919	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0920	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.0921	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0922	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0923	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0924	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0925	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0926	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0927	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0928	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0929	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0930	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.0931	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.0932	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.0933	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.0934	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.0935	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.0936	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 260mm

052.1025	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.1026	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.1027	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.1028	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.1029	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.1030	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.1031	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1032	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1033	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1034	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1035	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1036	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1037	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1038	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1039	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe K	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1040	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe K	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1041	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1042	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1043	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1044	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1045	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1046	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1047	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1048	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1049	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1050	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1051	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1052	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1053	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1054	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1055	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1056	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1057	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1058	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1059	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1060	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1061	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.1062	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.1063	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.1064	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.1065	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.1066	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.1067	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.1068	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 260mm

052.1157	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.1158	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.1159	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.1160	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.1161	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1162	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1163	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1164	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1165	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1166	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1167	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1168	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1169	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe W	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1170	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe W	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1171	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1172	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1173	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1174	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1175	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1176	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1177	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1178	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1179	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1180	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1181	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1182	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1183	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1184	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1185	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1186	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1187	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1188	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1189	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1190	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1191	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.1192	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.1193	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.1194	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.1195	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.1196	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.1197	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.1198	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.1199	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.1200	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 260mm

052.1289	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.1290	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.1291	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1292	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1293	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1294	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1295	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1296	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1297	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1298	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1299	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1300	Cânula de Debridação janela de corte INC Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1301	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1302	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1303	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1304	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1305	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.1306	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.1307	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
052.1308	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 270mm
052.1309	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
052.1310	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 280mm
052.1311	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
052.1312	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 290mm
052.1313	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
052.1314	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 300mm
052.1315	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 310mm
052.1316	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 310mm
052.1317	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
052.1318	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 320mm
052.1319	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 330mm
052.1320	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 330mm
052.1321	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.1322	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.1323	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.1324	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.1325	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1326	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1327	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1328	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 240mm
052.1329	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1330	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 250mm
052.1331	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe A	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
052.1332	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe A	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 260mm

052.1553	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 330mm
052.1554	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 330mm
052.1555	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.1556	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 340mm
052.1557	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.1558	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 350mm
052.1559	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe J	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
052.1560	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe J	Øe 5,0mm x Øi 3,5mm x 360mm