

# INSTRUÇÕES DE USO

**NOME COMERCIAL: CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO PARA QUADRIL R3A**

Nome Técnico: Cânulas

**ANVISA nº 80989259025**

Fabricante:

**R3A Medical Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda**

Endereço: Av. Antonio Martinez Carrera Filho, 72 – CEAT CEP 13.573-420 – São Carlos – SP.

CNPJ: 14.697.578/0001-53 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Telefone: (16) 36007560

E-mail: contato@r3amedical.com

**Responsável Técnico: Lígia Archiza Plaine – CRF/SP 88541**

– PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO (ETO) –  
– PROIBIDO REPROCESSAR –



**Antes da utilização do produto, o usuário deve ler atentamente as instruções de uso, as quais irão auxiliar o uso correto e seguro, protegendo contra possíveis riscos.**


## INDICAÇÃO DE USO

A CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO PARA QUADRIL R3A auxilia o cirurgião durante o procedimento de preparação para cirurgia de artroscopia na região do quadril. Deve ser utilizada de acordo com o protocolo médico escolhido. Tem como função a perfuração, corte e raspagem de tecidos moles, ósseos e cartilagosos em cirurgias minimamente invasivas.

## FORMA DE APRESENTAÇÃO

A CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO PARA QUADRIL R3A é comercializada de forma unitária.

Os materiais que compõem o produto são: aço inoxidável e alumínio.

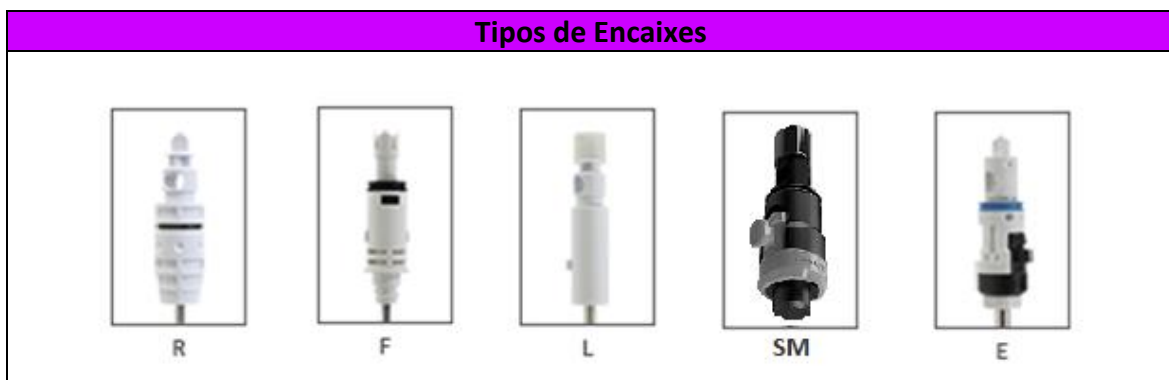

**Tipos de janela de corte:** BO / BA / BAP / BR / BD / CMA

**Encaixes:** R / F / L / SM / E

**Diâmetros:** 4,5 / 5,5 / 6,5 mm

**Comprimentos:** 130 / 135 / 140 / 145 / 150 / 155 / 160 / 165 / 170 / 175 / 180 / 185 / 190 / 195 / 200 / 210 / 220 / 230 / 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 320 / 340 / 360 mm

## **FINALIDADE**

A Cântula de Debridação para Quadril R3A possui a função de realizar a debridação de tecidos moles, cartilagosos e ósseos em procedimentos cirúrgicos artroscópicos na região do quadril.

Destina-se aos médicos cirurgiões devidamente qualificados, familiarizados e treinados com o produto e com a técnica e/ou procedimento cirúrgico escolhido.

## **ESTERILIZAÇÃO**

O dispositivo médico é fornecido ESTÉRIL. O método de esterilização utilizado é ETO (Óxido de Etileno), em concordância com a norma ABNT NBR ISO 11135, possuindo validade de 2 anos a partir da data de esterilização, caso a embalagem não esteja violada.

## **RECOMENDADO USO ÚNICO**

O fabricante recomenda o USO ÚNICO, não sendo aconselhável reprocessar, reesterilizar ou reutilizar os instrumentos, o que pode causar danos ao paciente. Seu descarte é feito em LIXO HOSPITALAR, conforme legislação vigente.

## **MODO DE UTILIZAÇÃO**

1. Verificar se a embalagem não está danificada;
2. Verificar se a indicação da esterilização está correta e seu prazo de validade;
3. Abrir a caixa de embalagem e retirar o blister selado;
4. A embalagem do instrumental estéril deverá ser aberta dentro do centro cirúrgico, seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, por profissionais qualificados, para que não haja riscos de contaminação;
5. Inserir a cântula selecionada no motor adequado até que haja o encaixe completo;
6. Ajustar a rotação adequada do equipamento;
7. Utilizar conforme protocolo médico escolhido;
8. Após o procedimento, retirar a cântula do motor e inutilizar e descartar o produto em LIXO HOSPITALAR, conforme legislação sanitária vigente.

## **VALIDADE**

O prazo de validade do dispositivo médico é de 2 anos após a data de esterilização.

**APÓS ABERTO, UTILIZAR IMEDIATAMENTE.**

## **ADVERTÊNCIAS**

- Não utilize caso a embalagem estiver rasgada, furada, danificada ou violada. A esterilidade não é válida se a embalagem protetora estiver violada.
- Não utilizar produtos fora da data de validade.
- O produto deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados e familiarizados com a técnica cirúrgica.
- As lâminas possuem melhor desempenho de corte em velocidades abaixo de 3000 RPM. Não é recomendado operar lâminas em velocidade maior que 6000 RPM.
- Não instalar ou remover as lâminas enquanto o motor da peça de mão estiver em funcionamento.
- O fabricante recomenda o USO ÚNICO, não sendo aconselhável reprocessar, reesterilizar ou reutilizar os instrumentos, o que pode causar danos ao paciente. Seu descarte é feito em LIXO HOSPITALAR, conforme legislação vigente.

## **PRECAUÇÕES**

- Verificar a integridade dos instrumentos antes do uso, atentando para possíveis danos mecânicos (amasso, quebra ou sinuosidade). Se o produto apresentar algum dano, o mesmo deverá ser inutilizado.
- Evitar esforços excessivos durante o procedimento cirúrgico para não danificar os instrumentais.
- Manusear os instrumentais com cuidado evitando perfurações nas luvas cirúrgicas.
- As lâminas devem ser periodicamente irrigadas para que não haja o acúmulo excessivo de tecidos.

## **CONTRAINDICAÇÕES**

Utilização em pacientes que tenham alergia a algum dos materiais que compõem o dispositivo médico.

Não é recomendado o uso do produto em regiões com infecção ativa.

## **EVENTOS ADVERSOS**

Não aplicável.

## **ARMAZENAMENTO**

- O transporte da embalagem contendo o produto deve ser feita com cuidado e armazenada em local seco, arejado e ao abrigo da luz;
- O produto deve ser mantido em embalagem original até o momento de sua utilização, sendo armazenado em local limpo, fresco, seco e longe de substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas;
- Não utilize caso a embalagem estiver rasgada, furada, danificada ou violada. A esterilidade não é válida se a embalagem protetora estiver violada;
- Não coloque sob pesos ou volumes, pois poderão danificar e comprometer a integridade e/ou qualidade do produto;
- Temperatura de 10 °C a 35 °C / Umidade Relativa de 30% a 75% (sem condensação).

## **TRANSPORTE**

- O produto deve ser transportado e acondicionado de forma a protegê-lo contra qualquer intempérie;
- A embalagem não deve estar furada, rasgada ou com algum tipo de dano, o que pode comprometer a integridade e qualidade do produto. Deve ser armazenada ao abrigo da luz, umidade, calor e sujidades;
- Não coloque sob pesos ou volumes, pois poderão danificar e comprometer a integridade e/ou qualidade do produto;
- Temperatura de 10 °C a 35 °C / Umidade Relativa de 30% a 75% (sem condensação).

## **DESCARTE**

- Inutilizar e descartar o produto caso sua integridade tenha sido comprometida, durante o transporte, armazenamento e/ou manuseio inadequados.

- Inutilizar caso a embalagem estiver violada ou fora do prazo de validade, pois a esterilidade não será válida.
- Inutilizar após realização do procedimento médico escolhido. O FABRICANTE RECOMENDA O USO ÚNICO.

DESCARTAR O PRODUTO CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA LOCAL.

## **RASTREABILIDADE**

O produto contém em sua etiqueta de rótulo e nas etiquetas de rastreabilidade que acompanham o produto todas as informações necessárias e requeridas que irão possibilitar sua rastreabilidade, caso seja necessário.

## **GARANTIA**

A R3A Medical oferece a garantia de seus produtos por 6 meses, contra defeitos de fabricação. Essa garantia NÃO cobre defeitos que surjam devido ao transporte, armazenamento e/ou manipulação inadequados.

## **ATENDIMENTO AO CLIENTE**

Caso o produto médico esteja fora de suas especificações descritas nesta instrução de uso e/ou esteja gerando quaisquer insatisfações, notifique diretamente a R3A Medical. Identifique e descreva a não conformidade para: Av. Antonio Martinez Carrera Filho, 72 – CEAT CEP 13.573-420 – São Carlos – SP, telefone – (16) 36007560, e-mail: contato@r3amedical.com.

## **MODELOS E CÓDIGOS COMERCIAIS**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Dimensões</b>
059.0001	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.0002	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.0003	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.0004	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.0005	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.0006	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.0007	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.0008	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm

059.0009	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.0010	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.0011	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.0012	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.0013	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.0014	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.0015	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.0016	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.0017	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.0018	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.0019	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.0020	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.0021	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.0022	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.0023	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.0024	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.0025	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.0026	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.0027	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.0028	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.0029	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.0030	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.0031	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.0032	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.0033	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.0034	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.0035	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.0036	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.0037	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.0038	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.0039	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.0040	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.0041	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.0042	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.0043	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.0044	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.0045	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.0046	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.0047	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.0048	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.0049	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.0050	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.0051	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.0052	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm

INSTRUÇÕES DE USO: CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO PARA QUADRIL R3A - Revisão 02 de 20/05/2025

059.0053	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.0054	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.0055	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.0056	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.0057	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.0058	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.0059	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.0060	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.0061	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.0062	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.0063	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.0064	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.0065	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.0066	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.0067	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.0068	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.0069	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.0070	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.0071	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.0072	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.0073	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.0074	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.0075	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.0076	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.0077	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.0078	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.0079	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.0080	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.0081	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.0082	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.0083	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.0084	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.0085	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.0086	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.0087	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.0088	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.0089	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.0090	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.0091	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.0092	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.0093	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.0094	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.0095	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.0096	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm

059.0097	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.0098	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.0099	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.0100	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.0101	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.0102	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.0103	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.0104	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.0105	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.0106	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.0107	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.0108	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.0109	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.0110	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.0111	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.0112	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.0113	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.0114	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.0115	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.0116	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.0117	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.0118	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.0119	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.0120	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.0121	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.0122	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.0123	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.0124	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.0125	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.0126	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.0127	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.0128	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.0129	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.0130	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.0131	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.0132	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.0133	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.0134	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.0135	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.0136	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.0137	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.0138	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.0139	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.0140	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm

059.0141	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.0142	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.0143	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.0144	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.0145	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.0146	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.0147	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.0148	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.0149	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.0150	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.0151	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.0152	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.0153	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.0154	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.0155	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.0156	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.0157	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.0158	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.0159	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.0160	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.0161	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.0162	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.0163	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.0164	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.0165	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.0166	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.0167	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.0168	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.0169	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.0170	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.0171	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.0172	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.0173	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.0174	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.0175	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.0176	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.0177	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.0178	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.0179	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.0180	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.0181	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.0182	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.0183	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.0184	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm

059.0185	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.0186	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.0187	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.0188	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.0189	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.0190	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.0191	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.0192	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.0193	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.0194	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.0195	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.0196	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.0197	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.0198	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.0199	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.0200	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.0201	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.0202	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.0203	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.0204	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.0205	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.0206	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.0207	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.0208	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.0209	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.0210	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.0211	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.0212	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.0213	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.0214	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.0215	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.0216	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.0217	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.0218	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.0219	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.0220	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.0221	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.0222	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.0223	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.0224	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.0225	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.0226	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.0227	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.0228	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm

059.0229	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.0230	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.0231	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.0232	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.0233	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.0234	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.0235	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.0236	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.0237	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.0238	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.0239	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.0240	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.0241	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.0242	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.0243	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.0244	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.0245	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.0246	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.0247	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.0248	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.0249	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.0250	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.0251	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.0252	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.0253	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.0254	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.0255	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.0256	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.0257	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.0258	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.0259	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.0260	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.0261	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.0262	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.0263	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.0264	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.0265	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.0266	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.0267	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.0268	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.0269	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.0270	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.0271	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.0272	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm

059.0273	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.0274	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.0275	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.0276	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.0277	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.0278	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.0279	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.0280	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.0281	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.0282	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.0283	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.0284	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.0285	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.0286	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.0287	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.0288	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.0289	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.0290	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.0291	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.0292	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.0293	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.0294	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.0295	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.0296	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.0297	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.0298	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.0299	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.0300	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.0301	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.0302	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.0303	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.0304	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.0305	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.0306	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.0307	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.0308	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.0309	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.0310	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.0311	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.0312	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.0313	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.0314	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.0315	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.0316	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm

059.0317	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.0318	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.0319	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.0320	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.0321	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.0322	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.0323	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.0324	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.0325	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.0326	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.0327	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.0328	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.0329	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.0330	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.0331	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.0332	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.0333	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.0334	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.0335	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.0336	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.0337	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.0338	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.0339	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.0340	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.0341	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.0342	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.0343	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.0344	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.0345	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.0346	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.0347	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.0348	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.0349	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.0350	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.0351	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.0352	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.0353	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.0354	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.0355	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.0356	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.0357	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.0358	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.0359	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.0360	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm

059.0361	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.0362	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.0363	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.0364	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.0365	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.0366	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.0367	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.0368	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.0369	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.0370	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.0371	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.0372	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.0373	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.0374	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.0375	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.0376	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.0377	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.0378	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.0379	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.0380	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.0381	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.0382	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.0383	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.0384	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.0385	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.0386	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.0387	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.0388	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.0389	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.0390	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.0391	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.0392	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.0393	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.0394	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.0395	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.0396	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.0397	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.0398	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.0399	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.0400	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.0401	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.0402	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.0403	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.0404	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm

059.0405	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.0406	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.0407	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.0408	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.0409	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.0410	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.0411	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.0412	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.0413	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.0414	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.0415	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.0416	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.0417	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.0418	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.0419	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.0420	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.0421	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.0422	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.0423	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.0424	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.0425	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.0426	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.0427	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.0428	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.0429	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.0430	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.0431	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.0432	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.0433	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.0434	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.0435	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.0436	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.0437	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.0438	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.0439	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.0440	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.0441	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.0442	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.0443	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.0444	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.0445	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.0446	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.0447	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.0448	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm

059.0449	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.0450	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.0451	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.0452	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.0453	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.0454	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.0455	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.0456	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.0457	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.0458	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.0459	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.0460	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.0461	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.0462	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.0463	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.0464	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.0465	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.0466	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.0467	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.0468	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.0469	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.0470	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.0471	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.0472	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.0473	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.0474	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.0475	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.0476	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.0477	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.0478	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.0479	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.0480	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.0481	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.0482	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.0483	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.0484	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.0485	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.0486	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.0487	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.0488	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.0489	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.0490	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.0491	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.0492	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm

059.0493	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.0494	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.0495	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.0496	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.0497	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.0498	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.0499	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.0500	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.0501	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.0502	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.0503	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.0504	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe R	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.0505	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.0506	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.0507	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.0508	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.0509	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.0510	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.0511	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.0512	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.0513	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.0514	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.0515	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.0516	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.0517	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.0518	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.0519	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.0520	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.0521	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.0522	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.0523	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.0524	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.0525	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.0526	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.0527	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.0528	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.0529	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.0530	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.0531	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.0532	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.0533	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.0534	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.0535	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.0536	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm

059.0537	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.0538	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.0539	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.0540	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.0541	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.0542	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.0543	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.0544	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.0545	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.0546	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.0547	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.0548	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.0549	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.0550	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.0551	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.0552	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.0553	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.0554	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.0555	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.0556	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.0557	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.0558	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.0559	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.0560	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.0561	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.0562	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.0563	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.0564	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.0565	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.0566	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.0567	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.0568	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.0569	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.0570	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.0571	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.0572	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.0573	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.0574	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.0575	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.0576	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.0577	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.0578	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.0579	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.0580	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm

059.0581	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.0582	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.0583	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.0584	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.0585	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.0586	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.0587	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.0588	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.0589	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.0590	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.0591	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.0592	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.0593	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.0594	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.0595	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.0596	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.0597	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.0598	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.0599	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.0600	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.0601	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.0602	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.0603	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.0604	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.0605	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.0606	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.0607	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.0608	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.0609	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.0610	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.0611	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.0612	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.0613	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.0614	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.0615	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.0616	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.0617	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.0618	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.0619	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.0620	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.0621	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.0622	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.0623	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.0624	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm

059.0625	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.0626	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.0627	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.0628	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.0629	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.0630	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.0631	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.0632	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.0633	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.0634	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.0635	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.0636	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.0637	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.0638	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.0639	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.0640	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.0641	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.0642	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.0643	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.0644	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.0645	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.0646	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.0647	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.0648	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.0649	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.0650	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.0651	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.0652	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.0653	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.0654	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.0655	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.0656	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.0657	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.0658	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.0659	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.0660	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.0661	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.0662	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.0663	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.0664	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.0665	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.0666	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.0667	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.0668	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm

059.0669	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.0670	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.0671	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.0672	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.0673	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.0674	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.0675	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.0676	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.0677	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.0678	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.0679	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.0680	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.0681	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.0682	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.0683	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.0684	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.0685	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.0686	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.0687	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.0688	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.0689	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.0690	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.0691	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.0692	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.0693	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.0694	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.0695	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.0696	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.0697	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.0698	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.0699	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.0700	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.0701	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.0702	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.0703	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.0704	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.0705	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.0706	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.0707	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.0708	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.0709	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.0710	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.0711	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.0712	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm

059.0713	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.0714	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.0715	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.0716	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.0717	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.0718	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.0719	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.0720	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.0721	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.0722	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.0723	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.0724	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.0725	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.0726	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.0727	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.0728	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.0729	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.0730	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.0731	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.0732	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.0733	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.0734	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.0735	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.0736	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.0737	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.0738	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.0739	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.0740	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.0741	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.0742	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.0743	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.0744	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.0745	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.0746	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.0747	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.0748	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.0749	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.0750	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.0751	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.0752	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.0753	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.0754	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.0755	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.0756	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm

059.0757	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.0758	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.0759	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.0760	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.0761	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.0762	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.0763	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.0764	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.0765	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.0766	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.0767	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.0768	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.0769	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.0770	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.0771	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.0772	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.0773	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.0774	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.0775	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.0776	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.0777	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.0778	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.0779	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.0780	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.0781	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.0782	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.0783	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.0784	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.0785	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.0786	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.0787	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.0788	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.0789	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.0790	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.0791	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.0792	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.0793	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.0794	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.0795	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.0796	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.0797	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.0798	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.0799	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.0800	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm

059.0801	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.0802	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.0803	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.0804	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.0805	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.0806	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.0807	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.0808	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.0809	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.0810	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.0811	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.0812	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.0813	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.0814	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.0815	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.0816	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.0817	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.0818	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.0819	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.0820	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.0821	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.0822	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.0823	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.0824	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.0825	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.0826	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.0827	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.0828	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.0829	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.0830	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.0831	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.0832	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.0833	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.0834	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.0835	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.0836	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.0837	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.0838	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.0839	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.0840	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.0841	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.0842	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.0843	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.0844	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm

059.0845	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.0846	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.0847	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.0848	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.0849	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.0850	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.0851	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.0852	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.0853	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.0854	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.0855	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.0856	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.0857	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.0858	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.0859	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.0860	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.0861	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.0862	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.0863	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.0864	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.0865	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.0866	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.0867	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.0868	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.0869	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.0870	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.0871	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.0872	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.0873	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.0874	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.0875	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.0876	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.0877	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.0878	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.0879	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.0880	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.0881	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.0882	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.0883	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.0884	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.0885	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.0886	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.0887	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.0888	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm

059.0889	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.0890	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.0891	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.0892	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.0893	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.0894	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.0895	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.0896	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.0897	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.0898	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.0899	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.0900	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.0901	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.0902	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.0903	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.0904	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.0905	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.0905	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.0907	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.0908	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.0909	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.0910	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.0911	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.0912	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.0913	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.0914	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.0915	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.0916	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.0917	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.0918	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.0919	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.0920	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.0921	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.0922	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.0923	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.0924	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.0925	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.0926	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.0927	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.0928	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.0929	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.0930	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.0931	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.0932	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm

059.0933	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.0934	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.0935	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.0936	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.0937	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.0938	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.0939	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.0940	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.0941	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.0942	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.0943	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.0944	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.0945	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.0946	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.0947	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.0948	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.0949	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.0950	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.0951	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.0952	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.0953	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.0954	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.0955	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.0956	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.0957	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.0958	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.0959	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.0960	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.0961	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.0962	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.0963	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.0964	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.0965	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.0966	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.0967	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.0968	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.0969	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.0970	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.0971	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.0972	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.0973	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.0974	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.0975	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.0976	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm

059.0977	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.0978	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.0979	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.0980	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.0981	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.0982	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.0983	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.0984	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.0985	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.0986	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.0987	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.0988	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.0989	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.0990	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.0991	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.0992	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.0993	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.0994	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.0995	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.0996	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.0997	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.0998	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.0999	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.1000	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.1001	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.1002	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.1003	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.1004	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.1005	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.1006	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.1007	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.1008	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe F	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.1009	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.1010	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.1011	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.1012	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.1013	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.1014	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.1015	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.1016	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.1017	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.1018	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.1019	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.1020	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm

059.1021	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.1022	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.1023	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.1024	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.1025	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.1026	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.1027	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.1028	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.1029	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.1030	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.1031	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.1032	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.1033	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.1034	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.1035	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.1036	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.1037	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.1038	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.1039	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.1040	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.1041	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.1042	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.1043	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.1044	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.1045	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.1046	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.1047	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.1048	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.1049	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.1050	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.1051	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.1052	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.1053	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.1054	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.1055	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.1056	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.1057	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.1058	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.1059	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.1060	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.1061	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.1062	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.1063	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.1064	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm

059.1065	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.1066	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.1067	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.1068	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.1069	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.1070	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.1071	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.1072	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.1073	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.1074	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.1075	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.1076	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.1077	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.1078	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.1079	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.1080	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.1081	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.1082	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.1083	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.1084	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.1085	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.1086	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.1087	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.1088	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.1089	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.1090	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.1091	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.1092	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.1093	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.1094	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.1095	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.1096	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.1097	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.1098	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.1099	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.1100	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.1101	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.1102	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.1103	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.1104	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.1105	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.1106	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.1107	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.1108	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm

059.1109	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.1110	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.1111	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.1112	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.1113	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.1114	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.1115	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.1116	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.1117	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.1118	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.1119	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.1120	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.1121	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.1122	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.1123	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.1124	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.1125	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.1126	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.1127	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.1128	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.1129	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.1130	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.1131	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.1132	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.1133	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.1134	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.1135	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.1136	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.1137	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.1138	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.1139	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.1140	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.1141	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.1142	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.1143	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.1144	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.1145	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.1146	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.1147	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.1148	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.1149	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.1150	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.1151	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.1152	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm

059.1153	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.1154	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.1155	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.1156	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.1157	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.1158	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.1159	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.1160	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.1161	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.1162	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.1163	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.1164	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.1165	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.1166	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.1167	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.1168	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.1169	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.1170	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.1171	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.1172	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.1173	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.1174	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.1175	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.1176	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.1177	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.1178	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.1179	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.1180	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.1181	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.1182	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.1183	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.1184	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.1185	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.1186	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.1187	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.1188	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.1189	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.1190	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.1191	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.1192	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.1193	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.1194	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.1195	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.1196	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm

059.1197	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.1198	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.1199	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.1200	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.1201	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.1202	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.1203	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.1204	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.1205	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.1206	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.1207	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.1208	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.1209	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.1210	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.1211	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.1212	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.1213	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.1214	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.1215	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.1216	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.1217	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.1218	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.1219	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.1220	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.1221	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.1222	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.1223	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.1224	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.1225	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.1226	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.1227	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.1228	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.1229	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.1230	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.1231	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.1232	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.1233	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.1234	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.1235	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.1236	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.1237	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.1238	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.1239	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.1240	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm

059.1241	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.1242	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.1243	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.1244	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.1245	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.1246	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.1247	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.1248	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.1249	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.1250	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.1251	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.1252	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.1253	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.1254	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.1255	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.1256	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.1257	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.1258	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.1259	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.1260	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.1261	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.1262	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.1263	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.1264	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.1265	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.1266	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.1267	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.1268	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.1269	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.1270	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.1271	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.1272	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.1273	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.1274	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.1275	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.1276	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.1277	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.1278	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.1279	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.1280	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.1281	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.1282	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.1283	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.1284	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm

059.1285	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.1286	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.1287	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.1288	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.1289	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.1290	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.1291	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.1292	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.1293	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.1294	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.1295	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.1296	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.1297	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.1298	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.1299	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.1300	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.1301	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.1302	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.1303	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.1304	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.1305	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.1306	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.1307	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.1308	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.1309	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.1310	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.1311	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.1312	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.1313	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.1314	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.1315	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.1316	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.1317	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.1318	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.1319	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.1320	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.1321	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.1322	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.1323	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.1324	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.1325	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.1326	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.1327	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.1328	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm

059.1329	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.1330	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.1331	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.1332	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.1333	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.1334	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.1335	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.1336	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.1337	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.1338	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.1339	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.1340	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.1341	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.1342	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.1343	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.1344	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.1345	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.1346	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.1347	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.1348	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.1349	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.1350	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.1351	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.1352	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.1353	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.1354	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.1355	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.1356	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.1357	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.1358	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.1359	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.1360	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.1361	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.1362	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.1363	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.1364	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.1365	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.1366	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.1367	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.1368	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.1369	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.1370	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.1371	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.1372	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm

059.1373	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.1374	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.1375	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.1376	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.1377	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.1378	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.1379	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.1380	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.1381	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.1382	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.1383	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.1384	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.1385	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.1386	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.1387	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.1388	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.1389	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.1390	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.1391	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.1392	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.1393	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.1394	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.1395	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.1396	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.1397	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.1398	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.1399	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.1400	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.1401	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.1402	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.1403	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.1404	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.1405	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.1406	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.1407	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.1408	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.1409	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.1410	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.1411	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.1412	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.1413	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.1414	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.1415	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.1416	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm

059.1417	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.1418	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.1419	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.1420	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.1421	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.1422	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.1423	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.1424	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.1425	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.1426	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.1427	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.1428	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.1429	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.1430	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.1431	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.1432	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.1433	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.1434	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.1435	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.1436	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.1437	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.1438	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.1439	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.1440	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.1441	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.1442	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.1443	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.1444	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.1445	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.1446	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.1447	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.1448	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.1449	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.1450	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.1451	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.1452	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.1453	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.1454	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.1455	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.1456	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.1457	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.1458	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.1459	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.1460	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm

059.1461	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.1462	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.1463	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.1464	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.1465	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.1466	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.1467	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.1468	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.1469	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.1470	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.1471	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.1472	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.1473	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.1474	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.1475	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.1476	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.1477	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.1478	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.1479	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.1480	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.1481	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.1482	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.1483	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.1484	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.1485	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.1486	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.1487	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.1488	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.1489	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.1490	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.1491	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.1492	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.1493	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.1494	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.1495	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.1496	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.1497	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.1498	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.1499	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.1500	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.1501	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.1502	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.1503	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.1504	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm

059.1505	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.1506	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.1507	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.1508	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.1509	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.1510	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.1511	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.1512	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe L	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.1513	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.1514	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.1515	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.1516	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.1517	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.1518	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.1519	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.1520	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.1521	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.1522	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.1523	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.1524	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.1525	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.1526	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.1527	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.1528	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.1529	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.1530	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.1531	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.1532	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.1533	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.1534	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.1535	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.1536	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.1537	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.1538	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.1539	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.1540	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.1541	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.1542	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.1543	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.1544	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.1545	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.1546	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.1547	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.1548	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm

059.1549	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.1550	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.1551	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.1552	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.1553	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.1554	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.1555	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.1556	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.1557	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.1558	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.1559	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.1560	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.1561	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.1562	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.1563	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.1564	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.1565	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.1566	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.1567	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.1568	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.1569	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.1570	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.1571	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.1572	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.1573	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.1574	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.1575	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.1576	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.1577	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.1578	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.1579	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.1580	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.1581	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.1582	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.1583	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.1584	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.1585	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.1586	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.1587	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.1588	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.1589	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.1590	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.1591	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.1592	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm

059.1593	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.1594	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.1595	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.1596	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.1597	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.1598	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.1599	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.1600	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.1601	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.1602	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.1603	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.1604	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.1605	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.1606	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.1607	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.1608	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.1609	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.1610	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.1611	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.1612	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.1613	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.1614	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.1615	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.1616	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.1617	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.1618	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.1619	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.1620	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.1621	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.1622	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.1623	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.1624	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.1625	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.1626	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.1627	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.1628	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.1629	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.1630	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.1631	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.1632	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.1633	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.1634	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.1635	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.1636	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm

059.1637	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.1638	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.1639	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.1640	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.1641	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.1642	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.1643	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.1644	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.1645	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.1646	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.1647	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.1648	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.1649	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.1650	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.1651	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.1652	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.1653	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.1654	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.1655	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.1656	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.1657	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.1658	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.1659	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.1660	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.1661	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.1662	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.1663	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.1664	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.1665	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.1666	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.1667	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.1668	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.1669	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.1670	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.1671	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.1672	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.1673	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.1674	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.1675	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.1676	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.1677	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.1678	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.1679	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.1680	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm

059.1681	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.1682	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.1683	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.1684	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.1685	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.1686	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.1687	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.1688	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.1689	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.1690	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.1691	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.1692	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.1693	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.1694	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.1695	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.1696	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.1697	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.1698	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.1699	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.1700	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.1701	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.1702	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.1703	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.1704	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.1705	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.1706	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.1707	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.1708	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.1709	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.1710	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.1711	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.1712	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.1713	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.1714	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.1715	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.1716	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.1717	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.1718	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.1719	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.1720	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.1721	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.1722	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.1723	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.1724	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm



059.1725	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.1726	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.1727	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.1728	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.1729	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.1730	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.1731	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.1732	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.1733	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.1734	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.1735	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.1736	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.1737	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.1738	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.1739	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.1740	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.1741	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.1742	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.1743	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.1744	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.1745	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.1746	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.1747	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.1748	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.1749	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.1750	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.1751	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.1752	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.1753	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.1754	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.1755	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.1756	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.1757	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.1758	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.1759	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.1760	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.1761	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.1762	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.1763	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.1764	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.1765	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.1766	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.1767	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.1768	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm

059.1769	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.1770	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.1771	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.1772	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.1773	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.1774	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.1775	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.1776	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.1777	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.1778	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.1779	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.1780	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.1781	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.1782	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.1783	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.1784	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.1785	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.1786	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.1787	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.1788	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.1789	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.1790	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.1791	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.1792	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.1793	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.1794	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.1795	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.1796	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.1797	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.1798	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.1799	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.1800	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.1801	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.1802	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.1803	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.1804	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.1805	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.1806	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.1807	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.1808	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.1809	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.1810	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.1811	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.1812	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm

059.1813	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.1814	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.1815	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.1816	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.1817	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.1818	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.1819	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.1820	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.1821	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.1822	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.1823	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.1824	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.1825	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.1826	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.1827	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.1828	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.1829	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.1830	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.1831	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.1832	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.1833	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.1834	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.1835	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.1836	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.1837	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.1838	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.1839	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.1840	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.1841	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.1842	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.1843	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.1844	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.1845	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.1846	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.1847	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.1848	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.1849	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.1850	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.1851	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.1852	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.1853	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.1854	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.1855	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.1856	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm

059.1857	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.1858	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.1859	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.1860	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.1861	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.1862	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.1863	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.1864	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.1865	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.1866	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.1867	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.1868	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.1869	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.1870	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.1871	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.1872	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.1873	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.1874	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.1875	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.1876	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.1877	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.1878	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.1879	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.1880	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.1881	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.1882	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.1883	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.1884	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.1885	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.1886	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.1887	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.1888	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.1889	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.1890	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.1891	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.1892	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.1893	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.1894	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.1895	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.1896	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.1897	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.1898	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.1899	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.1900	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm

059.1901	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.1902	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.1903	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.1904	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.1905	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.1906	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.1907	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.1908	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.1909	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.1910	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.1911	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.1912	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.1913	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.1914	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.1915	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.1916	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.1917	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.1918	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.1919	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.1920	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.1921	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.1922	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.1923	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.1924	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.1925	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.1926	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.1927	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.1928	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.1929	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.1930	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.1931	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.1932	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.1933	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.1934	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.1935	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.1936	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.1937	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.1938	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.1939	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.1940	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.1941	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.1942	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.1943	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.1944	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm

059.1945	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.1946	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.1947	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.1948	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.1949	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.1950	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.1951	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.1952	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.1953	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.1954	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.1955	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.1956	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.1957	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.1958	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.1959	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.1960	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.1961	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.1962	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.1963	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.1964	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.1965	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.1966	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.1967	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.1968	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.1969	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.1970	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.1971	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.1972	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.1973	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.1974	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.1975	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.1976	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.1977	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.1978	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.1979	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.1980	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.1981	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.1982	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.1983	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.1984	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.1985	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.1986	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.1987	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.1988	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm

059.1989	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.1990	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.1991	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.1992	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.1993	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.1994	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.1995	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.1996	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.1997	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.1998	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.1999	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.2000	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.2001	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.2002	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.2003	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.2004	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.2005	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.2006	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.2007	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.2008	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.2009	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.2010	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.2011	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.2012	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.2013	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.2014	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.2015	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.2016	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe SM	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.2017	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.2018	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.2019	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.2020	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.2021	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.2022	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.2023	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.2024	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.2025	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.2026	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.2027	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.2028	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.2029	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm
059.2030	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.2031	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.2032	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 130mm

059.2033	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 130mm
059.2034	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 130mm
059.2035	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.2036	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.2037	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.2038	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.2039	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.2040	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.2041	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.2042	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.2043	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.2044	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.2045	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.2046	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.2047	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.2048	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.2049	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.2050	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 135mm
059.2051	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 135mm
059.2052	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 135mm
059.2053	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.2054	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.2055	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.2056	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.2057	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.2058	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.2059	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.2060	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.2061	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.2062	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.2063	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.2064	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.2065	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.2066	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.2067	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.2068	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 140mm
059.2069	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 140mm
059.2070	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 140mm
059.2071	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.2072	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.2073	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.2074	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.2075	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.2076	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm

059.2077	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.2078	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.2079	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.2080	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.2081	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.2082	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.2083	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.2084	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.2085	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.2086	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 145mm
059.2087	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 145mm
059.2088	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 145mm
059.2089	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.2090	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.2091	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.2092	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.2093	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.2094	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.2095	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.2096	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.2097	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.2098	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.2099	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.2100	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.2101	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.2102	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.2103	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.2104	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 150mm
059.2105	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 150mm
059.2106	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 150mm
059.2107	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.2108	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.2109	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.2110	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.2111	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.2112	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.2113	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.2114	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.2115	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.2116	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.2117	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.2118	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.2119	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.2120	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm

059.2121	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.2122	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 155mm
059.2123	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 155mm
059.2124	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 155mm
059.2125	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.2126	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.2127	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.2128	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.2129	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.2130	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.2131	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.2132	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.2133	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.2134	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.2135	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.2136	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.2137	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.2138	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.2139	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.2140	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 160mm
059.2141	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 160mm
059.2142	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 160mm
059.2143	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.2144	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.2145	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.2146	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.2147	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.2148	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.2149	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.2150	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.2151	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.2152	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.2153	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.2154	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.2155	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.2156	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.2157	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.2158	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 165mm
059.2159	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 165mm
059.2160	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 165mm
059.2161	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.2162	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.2163	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.2164	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm

059.2165	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.2166	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.2167	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.2168	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.2169	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.2170	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.2171	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.2172	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.2173	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.2174	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.2175	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.2176	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 170mm
059.2177	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 170mm
059.2178	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 170mm
059.2179	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.2180	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.2181	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.2182	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.2183	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.2184	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.2185	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.2186	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.2187	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.2188	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.2189	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.2190	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.2191	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.2192	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.2193	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.2194	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 175mm
059.2195	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 175mm
059.2196	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 175mm
059.2197	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.2198	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.2199	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.2200	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.2201	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.2202	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.2203	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.2204	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.2205	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.2206	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.2207	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.2208	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm

059.2209	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.2210	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.2211	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.2212	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 180mm
059.2213	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 180mm
059.2214	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 180mm
059.2215	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.2216	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.2217	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.2218	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.2219	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.2220	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.2221	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.2222	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.2223	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.2224	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.2225	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.2226	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.2227	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.2228	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.2229	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.2230	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 185mm
059.2231	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 185mm
059.2232	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 185mm
059.2233	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.2234	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.2235	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.2236	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.2237	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.2238	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.2239	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.2240	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.2241	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.2242	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.2243	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.2244	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.2245	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.2246	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.2247	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.2248	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 190mm
059.2249	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 190mm
059.2250	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 190mm
059.2251	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.2252	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm



059.2253	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.2254	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.2255	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.2256	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.2257	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.2258	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.2259	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.2260	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.2261	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.2262	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.2263	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.2264	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.2265	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.2266	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 195mm
059.2267	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 195mm
059.2268	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 195mm
059.2269	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.2270	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.2271	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.2272	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.2273	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.2274	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.2275	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.2276	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.2277	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.2278	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.2279	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.2280	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.2281	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.2282	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.2283	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.2284	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 200mm
059.2285	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 200mm
059.2286	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 200mm
059.2287	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.2288	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.2289	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.2290	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.2291	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.2292	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.2293	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.2294	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.2295	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.2296	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm

059.2297	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.2298	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.2299	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.2300	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.2301	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.2302	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 210mm
059.2303	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 210mm
059.2304	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 210mm
059.2305	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.2306	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.2307	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.2308	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.2309	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.2310	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.2311	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.2312	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.2313	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.2314	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.2315	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.2316	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.2317	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.2318	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.2319	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.2320	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 220mm
059.2321	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 220mm
059.2322	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 220mm
059.2323	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.2324	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.2325	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.2326	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.2327	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.2328	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.2329	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.2330	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.2331	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.2332	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.2333	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.2334	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.2335	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.2336	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.2337	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm
059.2338	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 230mm
059.2339	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 230mm
059.2340	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 230mm

059.2341	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.2342	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.2343	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.2344	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.2345	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.2346	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.2347	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.2348	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.2349	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.2350	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.2351	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.2352	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.2353	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.2354	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.2355	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.2356	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 240mm
059.2357	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 240mm
059.2358	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 240mm
059.2359	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.2360	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.2361	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.2362	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.2363	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.2364	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.2365	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.2366	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.2367	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.2368	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.2369	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.2370	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.2371	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.2372	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.2373	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.2374	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 250mm
059.2375	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 250mm
059.2376	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 250mm
059.2377	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.2378	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.2379	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.2380	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.2381	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.2382	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.2383	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.2384	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm

059.2385	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.2386	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.2387	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.2388	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.2389	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.2390	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.2391	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.2392	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 260mm
059.2393	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 260mm
059.2394	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 260mm
059.2395	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.2396	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.2397	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.2398	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.2399	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.2400	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.2401	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.2402	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.2403	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.2404	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.2405	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.2406	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.2407	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.2408	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.2409	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.2410	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 270mm
059.2411	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 270mm
059.2412	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 270mm
059.2413	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.2414	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.2415	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.2416	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.2417	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.2418	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.2419	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.2420	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.2421	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.2422	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.2423	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.2424	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.2425	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm
059.2426	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.2427	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.2428	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 280mm

059.2429	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 280mm
059.2430	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 280mm
059.2431	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.2432	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.2433	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.2434	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.2435	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.2436	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.2437	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.2438	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.2439	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.2440	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.2441	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.2442	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.2443	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.2444	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.2445	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.2446	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 290mm
059.2447	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 290mm
059.2448	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 290mm
059.2449	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.2450	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.2451	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.2452	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.2453	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.2454	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.2455	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.2456	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.2457	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.2458	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.2459	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.2460	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.2461	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.2462	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.2463	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.2464	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 300mm
059.2465	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 300mm
059.2466	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 300mm
059.2467	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.2468	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.2469	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.2470	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.2471	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.2472	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm

059.2473	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.2474	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.2475	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.2476	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.2477	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.2478	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.2479	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.2480	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.2481	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.2482	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 320mm
059.2483	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 320mm
059.2484	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 320mm
059.2485	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.2486	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.2487	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.2488	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.2489	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.2490	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.2491	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.2492	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.2493	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.2494	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.2495	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.2496	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.2497	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.2498	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.2499	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.2500	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 340mm
059.2501	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 340mm
059.2502	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 340mm
059.2503	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.2504	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.2505	Cânula de Debridação janela de corte BO Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.2506	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.2507	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.2508	Cânula de Debridação janela de corte BA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.2509	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.2510	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.2511	Cânula de Debridação janela de corte BAP Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.2512	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.2513	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.2514	Cânula de Debridação janela de corte BR Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.2515	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.2516	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm



059.2517	Cânula de Debridação janela de corte BD Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm
059.2518	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 4,5mm x Øi 3,5mm x 360mm
059.2519	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 5,5mm x Øi 4,5mm x 360mm
059.2520	Cânula de Debridação janela de corte CMA Encaixe E	Øe 6,5mm x Øi 5,5mm x 360mm