

NOME COMERCIAL: FULL SPINE

Nome Técnico: Kit Cirúrgico

ANVISA nº 80989250036

Fabricante:

R3A Medical Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

Endereço: Av. Antonio Martinez Carrera Filho, 72 – CEAT CEP 13.573-420 – São Carlos – SP.

CNPJ: 14.697.578/0001-53 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Telefone: (16) 36007560

E-mail: contato@r3amedical.com

Responsável Técnico: Lígia Archiza Plaine – CRF/SP 88541

– **PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO (ETO) –**
– **REPROCESSAMENTO PROIBIDO –**



Antes da utilização do produto, o usuário deve ler atentamente as instruções de uso, as quais irão auxiliar o uso correto e seguro, protegendo contra possíveis riscos.

INDICAÇÃO DE USO

O Full Spine é um kit com cânulas indicado para procedimentos de descompressão de hérnia de disco intervertebral (dissectomia percutânea) desde o nível cervical até o L5/S1, anuloplastia, anulotomia, nucleoplastia, por exemplo.

Possui uma cânula bipolar de coluna que, a base de energia enviada por um gerador eletrocirúrgico ao paciente, permite a realização de procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos da coluna, aplicado no disco intervertebral.

Deve ser utilizado em conjunto com irrigação de solução salina que permitem a formação de plasma na ponta do dispositivo e, assim, promovam o processo de ablação, coagulação e hemostasia pelo aumento da temperatura local.

FORMA DE APRESENTAÇÃO

O Full Spine é um kit cirúrgico que possui os seguintes componentes:

- 1 unidade: Cânula bipolar de coluna;
- 1 unidade: Cânula de punção sonovisível;
- 1 unidade: Fio guia com empurrador;
- 1 unidade: Cânula de punção;
- 1 unidade: Cânula de acesso;
- 1 unidade: Trefina;
- 1 unidade: Obturador;
- 3 unidades: Cânulas de debridaç o;
- 1 unidade: Equipo de irriga o.

Os materiais que comp em o produto s o: a o inoxid vel, pol mero poliuretano at xico, polipropileno at xico, poliacetal, copol mero ABS, liga de alum nio, silicone at xico e PVC at xico.

FINALIDADE

A finalidade do dispositivo médico é possibilitar o acesso percutâneo seguro, a partir do fio guia, da cânula de punção sonovisível, da cânula de punção, da cânula de acesso, da trefina e do obturador. O corte, desbaste e debridação óssea é promovido pelas cânulas de debridação. Já o equipo de irrigação permite a distensão tecidual e formação de plasma a partir da solução salina irrigada. A ablação, coagulação ou hemostasia no disco intervertebral ocorre quando a Cânula bipolar de coluna, que compõe o kit cirúrgico, é conectada ao gerador eletrocirúrgico, inserida na cavidade de acesso da cirurgia endoscópica de coluna e acionada.

Destina-se aos médicos cirurgiões devidamente qualificados, familiarizados e treinados com o produto e com a técnica e/ou procedimento cirúrgico escolhido.

ESTERILIZAÇÃO

O dispositivo médico é fornecido ESTÉRIL. O método de esterilização utilizado é ETO (Óxido de Etileno), em concordância com a norma ABNT NBR ISO 11135, possuindo validade de 3 anos a partir da data de esterilização, caso a embalagem não esteja violada.

REPROCESSAMENTO PROIBIDO

O dispositivo médico é de reprocessamento proibido. Seu descarte é feito em LIXO HOSPITALAR, conforme legislação vigente.

MODO DE UTILIZAÇÃO

1. Verificar se a embalagem não está danificada;
2. Verificar se o prazo de validade e a indicação da esterilização estão corretos;
3. Seu manuseio deve ser realizado somente por profissionais da área médico-hospitalar devidamente habilitados e familiarizados com as técnicas e procedimentos que envolvem seu uso;
4. Abrir a embalagem e retirar o produto, seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis;
5. Utilizar conforme protocolo médico escolhido;
6. Conectar a cânula bipolar ao gerador eletrocirúrgico compatível (NÃO INCLUSO) de forma adequada e segura;

7. Inserir a haste da cânula na cavidade de acesso da cirurgia com sua parte distal chegando até o disco intervertebral;

8. A empunhadreira deve ser pressionada para a projeção da ponta ativa e, por meio da condução elétrica promovida pelo fluido condutor que é irrigado à cavidade, ao ser ativado pelo pedal ou diretamente pelo gerador eletrocirúrgico, fornece energia térmica na ponta ativa ao tecido mole alvo da ablação, coagulação ou hemostasia.

9. A potência máxima no gerador eletrocirúrgico é de 40 W e a tensão máxima de entrada é de 300 V. Deve ser acionado de maneira intermitente, ou seja, entregar energia continuamente durante 5 segundos e ter intervalo de 10 segundos entre uma ativação e outra.

10. Após o procedimento, inutilizar e descartar os produtos em LIXO HOSPITALAR, conforme legislação sanitária vigente.

VALIDADE

O prazo de validade do dispositivo médico é de 3 anos após a data de esterilização.

APÓS ABERTO, UTILIZAR IMEDIATAMENTE.

ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar produtos fora da data de validade;
- NÃO utilize caso a embalagem esteja danificada, rasgada ou furada;
- Manipular os instrumentais com cuidado para que não haja perfuração nas luvas cirúrgicas e/ou paramentação cirúrgica;
- Não deve ser utilizada cânula de acesso que conduza energia, pois pode transmitir energia em locais indesejados;
- O dispositivo médico não deve se aproximar de líquidos ou gases inflamáveis, nem mesmo ser utilizado em ambiente com alta concentração de oxigênio;
- O procedimento cirúrgico deve ser realizado em meios endoscópicos com circulação de solução condutora, como soro fisiológico, por exemplo;
- Somente acionar a ponta ativa da cânula bipolar quando esta estiver no local correto para aplicação da energia;
- O produto é de REPROCESSAMENTO PROIBIDO, e seu descarte deve ser feito em lixo hospitalar, conforme legislação sanitária vigente.

PRECAUÇÕES

- Antes da utilização do produto, o usuário deve ler atentamente as instruções de uso, as quais irão auxiliar o uso correto e seguro, protegendo contra possíveis riscos;
- A embalagem estéril deverá ser aberta dentro do centro cirúrgico, por profissionais qualificados, para que não haja riscos de contaminação;
- O produto deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados e familiarizados com a técnica cirúrgica;
- Verificar a integridade da embalagem, especialmente a primária, e do produto antes do uso. Caso a embalagem apresente danos, como rasgos, furos ou violação, ou o dispositivo apresente defeitos visíveis, o mesmo deve ser descaracterizado, descartado e o fabricante ou distribuidor deve ser notificado;
- Se o dispositivo médico cair no chão, o mesmo deve ser descaracterizado e descartado;
- Verificar a conexão da cânula bipolar com o gerador eletrocirúrgico antes da utilização;
- Não exercer força excessiva durante o manuseio dos instrumentais. A pressão excessiva pode provocar danos em estruturas anatômicas e/ou nos tecidos.

CONTRAINDICAÇÕES

- Utilização em pacientes que tenham alergia a algum dos materiais que compõem o dispositivo médico;
- Pacientes que possuam implante eletrônico ativo, como marca-passos, por exemplo;
- Infecção local ou sistêmica ativa;
- Herniação de disco calcificada;
- Graves alterações degenerativas das articulações intervertebrais, colapso da altura do disco e Doença Degenerativa do Disco (DDD);
- Fragmento herniário sequestrado;
- Instabilidade segmentar significativa da coluna;
- Limitação de acessibilidade dos instrumentais por fatores anatômicos.

EVENTOS ADVERSOS

- Reações alérgicas;
- Lesão nervosa local, transitória ou permanente;
- Paresia e/ou disestesia, pela pressão prolongada do fluido de irrigação;
- Ruptura dural;
- Infecção pós-operatória;
- Sepsia;
- Hematoma;
- Trombose venosa;
- Embolia pulmonar;
- Distúrbios cardiovasculares;
- Dores residuais localizadas;
- Recidiva da hérnia discal;
- Danos térmicos a estruturas neurais;
- Queimaduras no paciente e no usuário, caso acionado acidental ou propositalmente em local inadequado, ou em caso de fuga de corrente em condições normais de uso;
- A ativação prolongada da ponta ativa por tempo superior ao indicado sem as pausas por tempo suficiente pode sobrecarregar a barreira de isolamento elétrico, levando-a a falha e consequente fuga de corrente.

ARMAZENAMENTO

- O transporte da embalagem contendo o produto deve ser feita com cuidado e armazenada em local seco, arejado e ao abrigo da luz;
- O produto deve ser mantido em embalagem original até o momento de sua utilização, sendo armazenado em local limpo, fresco, seco e longe de substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas;
- Não utilize caso a embalagem estiver rasgada, furada, danificada ou violada. A esterilidade não é válida se a embalagem protetora estiver violada;
- Não coloque sob pesos ou volumes, pois poderão danificar e comprometer a integridade e/ou qualidade do produto;
- Temperatura de 10 °C a 45 °C / Umidade Relativa de 30% a 75% (sem condensação).

TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado e acondicionado de forma a protegê-lo contra qualquer intempérie;
- A embalagem não deve estar furada, rasgada ou com algum tipo de dano, o que pode comprometer a integridade e qualidade do produto. Deve ser armazenada ao abrigo da luz, umidade, calor e sujidades;
- Não coloque sob pesos ou volumes, pois poderão danificar e comprometer a integridade e/ou qualidade do produto;
- Temperatura de 10 °C a 45 °C / Umidade Relativa de 30% a 75% (sem condensação).

DESCARTE

- Inutilizar e descartar o produto caso sua integridade tenha sido comprometida, durante o transporte, armazenamento e/ou manuseio inadequados.
- Inutilizar caso a embalagem estiver violada ou fora do prazo de validade, pois a esterilidade não será válida.
- Inutilizar após realização do procedimento médico escolhido. REPROCESSAMENTO PROIBIDO.

DESCARTAR O PRODUTO CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA LOCAL.

RASTREABILIDADE

O produto contém em sua etiqueta de rótulo e nas etiquetas de rastreabilidade que acompanham o produto todas as informações necessárias e requeridas que irão possibilitar sua rastreabilidade, caso seja necessário.

GARANTIA

A R3A Medical oferece a garantia de seus produtos por 6 meses, contra defeitos de fabricação. Essa garantia NÃO cobre defeitos que surjam devido ao transporte, armazenamento e/ou manipulação inadequados.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Caso o produto médico esteja fora de suas especificações descritas nesta instrução de uso e/ou esteja gerando quaisquer insatisfações, notifique diretamente a R3A Medical. Identifique e descreva a não conformidade para: Av. Antonio Martinez Carrera Filho, 72 – CEAT CEP 13.573-420 – São Carlos – SP, telefone – (16) 36007560, e-mail: contato@r3amedical.com.

MODELOS COMERCIAIS

Código	Descrição
118.001	FULL SPINE 3,5X300 R/L BD/BA
118.002	FULL SPINE 3,5X300 R/L BD/BAP
118.003	FULL SPINE 3,5X300 R/L BD/BAPL
118.004	FULL SPINE 3,5X300 R/L BA/BAP
118.005	FULL SPINE 3,5X300 R/L BA/BAPL
118.006	FULL SPINE 3,5X300 R/L BAP/BAPL
118.007	FULL SPINE 3,5X320 R/L BD/BA
118.008	FULL SPINE 3,5X320 R/L BD/BAP
118.009	FULL SPINE 3,5X320 R/L BD/BAPL
118.010	FULL SPINE 3,5X320 R/L BA/BAP
118.011	FULL SPINE 3,5X320 R/L BA/BAPL
118.012	FULL SPINE 3,5X320 R/L BAP/BAPL
118.013	FULL SPINE 3,5X360 R/L BD/BA
118.014	FULL SPINE 3,5X360 R/L BD/BAP
118.015	FULL SPINE 3,5X360 R/L BD/BAPL
118.016	FULL SPINE 3,5X360 R/L BA/BAP
118.017	FULL SPINE 3,5X360 R/L BA/BAPL
118.018	FULL SPINE 3,5X360 R/L BAP/BAPL
118.019	FULL SPINE 3,5X300 F/L BD/BA
118.020	FULL SPINE 3,5X300 F/L BD/BAP
118.021	FULL SPINE 3,5X300 F/L BD/BAPL
118.022	FULL SPINE 3,5X300 F/L BA/BAP
118.023	FULL SPINE 3,5X300 F/L BA/BAPL
118.024	FULL SPINE 3,5X300 F/L BAP/BAPL
118.025	FULL SPINE 3,5X320 F/L BD/BA
118.026	FULL SPINE 3,5X320 F/L BD/BAP
118.027	FULL SPINE 3,5X320 F/L BD/BAPL
118.028	FULL SPINE 3,5X320 F/L BA/BAP
118.029	FULL SPINE 3,5X320 F/L BA/BAPL
118.030	FULL SPINE 3,5X320 F/L BAP/BAPL
118.031	FULL SPINE 3,5X360 F/L BD/BA
118.032	FULL SPINE 3,5X360 F/L BD/BAP
118.033	FULL SPINE 3,5X360 F/L BD/BAPL
118.034	FULL SPINE 3,5X360 F/L BA/BAP
118.035	FULL SPINE 3,5X360 F/L BA/BAPL
118.036	FULL SPINE 3,5X360 F/L BAP/BAPL
118.037	FULL SPINE 3,5X300 E/L BD/BA
118.038	FULL SPINE 3,5X300 E/L BD/BAP
118.039	FULL SPINE 3,5X300 E/L BD/BAPL



118.040	FULL SPINE 3,5X300 E/L BA/BAP
118.041	FULL SPINE 3,5X300 E/L BA/BAPL
118.042	FULL SPINE 3,5X300 E/L BAP/BAPL
118.043	FULL SPINE 3,5X320 E/L BD/BA
118.044	FULL SPINE 3,5X320 E/L BD/BAP
118.045	FULL SPINE 3,5X320 E/L BD/BAPL
118.046	FULL SPINE 3,5X320 E/L BA/BAP
118.047	FULL SPINE 3,5X320 E/L BA/BAPL
118.048	FULL SPINE 3,5X320 E/L BAP/BAPL
118.049	FULL SPINE 3,5X360 E/L BD/BA
118.050	FULL SPINE 3,5X360 E/L BD/BAP
118.051	FULL SPINE 3,5X360 E/L BD/BAPL
118.052	FULL SPINE 3,5X360 E/L BA/BAP
118.053	FULL SPINE 3,5X360 E/L BA/BAPL
118.054	FULL SPINE 3,5X360 E/L BAP/BAPL
118.055	FULL SPINE 3,5X300 L/L BD/BA
118.056	FULL SPINE 3,5X300 L/L BD/BAP
118.057	FULL SPINE 3,5X300 L/L BD/BAPL
118.058	FULL SPINE 3,5X300 L/L BA/BAP
118.059	FULL SPINE 3,5X300 L/L BA/BAPL
118.060	FULL SPINE 3,5X300 L/L BAP/BAPL
118.061	FULL SPINE 3,5X320 L/L BD/BA
118.062	FULL SPINE 3,5X320 L/L BD/BAP
118.063	FULL SPINE 3,5X320 L/L BD/BAPL
118.064	FULL SPINE 3,5X320 L/L BA/BAP
118.065	FULL SPINE 3,5X320 L/L BA/BAPL
118.066	FULL SPINE 3,5X320 L/L BAP/BAPL
118.067	FULL SPINE 3,5X360 L/L BD/BA
118.068	FULL SPINE 3,5X360 L/L BD/BAP
118.069	FULL SPINE 3,5X360 L/L BD/BAPL
118.070	FULL SPINE 3,5X360 L/L BA/BAP
118.071	FULL SPINE 3,5X360 L/L BA/BAPL
118.072	FULL SPINE 3,5X360 L/L BAP/BAPL
118.073	FULL SPINE 3,5X300 ST/L BD/BA
118.074	FULL SPINE 3,5X300 ST/L BD/BAP
118.075	FULL SPINE 3,5X300 ST/L BD/BAPL
118.076	FULL SPINE 3,5X300 ST/L BA/BAP
118.077	FULL SPINE 3,5X300 ST/L BA/BAPL
118.078	FULL SPINE 3,5X300 ST/L BAP/BAPL
118.079	FULL SPINE 3,5X320 ST/L BD/BA
118.080	FULL SPINE 3,5X320 ST/L BD/BAP
118.081	FULL SPINE 3,5X320 ST/L BD/BAPL
118.082	FULL SPINE 3,5X320 ST/L BA/BAP
118.083	FULL SPINE 3,5X320 ST/L BA/BAPL
118.084	FULL SPINE 3,5X320 ST/L BAP/BAPL
118.085	FULL SPINE 3,5X360 ST/L BD/BA
118.086	FULL SPINE 3,5X360 ST/L BD/BAP
118.087	FULL SPINE 3,5X360 ST/L BD/BAPL
118.088	FULL SPINE 3,5X360 ST/L BA/BAP
118.089	FULL SPINE 3,5X360 ST/L BA/BAPL
118.090	FULL SPINE 3,5X360 ST/L BAP/BAPL
118.091	FULL SPINE 3,5X300 R/S BD/BA
118.092	FULL SPINE 3,5X300 R/S BD/BAP
118.093	FULL SPINE 3,5X300 R/S BD/BAPL
118.094	FULL SPINE 3,5X300 R/S BA/BAP

118.095	FULL SPINE 3,5X300 R/S BA/BAPL
118.096	FULL SPINE 3,5X300 R/S BAP/BAPL
118.097	FULL SPINE 3,5X320 R/S BD/BA
118.098	FULL SPINE 3,5X320 R/S BD/BAP
118.099	FULL SPINE 3,5X320 R/S BD/BAPL
118.100	FULL SPINE 3,5X320 R/S BA/BAP
118.101	FULL SPINE 3,5X320 R/S BA/BAPL
118.102	FULL SPINE 3,5X320 R/S BAP/BAPL
118.103	FULL SPINE 3,5X360 R/S BD/BA
118.104	FULL SPINE 3,5X360 R/S BD/BAP
118.105	FULL SPINE 3,5X360 R/S BD/BAPL
118.106	FULL SPINE 3,5X360 R/S BA/BAP
118.107	FULL SPINE 3,5X360 R/S BA/BAPL
118.108	FULL SPINE 3,5X360 R/S BAP/BAPL
118.109	FULL SPINE 3,5X300 F/S BD/BA
118.110	FULL SPINE 3,5X300 F/S BD/BAP
118.111	FULL SPINE 3,5X300 F/S BD/BAPL
118.112	FULL SPINE 3,5X300 F/S BA/BAP
118.113	FULL SPINE 3,5X300 F/S BA/BAPL
118.114	FULL SPINE 3,5X300 F/S BAP/BAPL
118.115	FULL SPINE 3,5X320 F/S BD/BA
118.116	FULL SPINE 3,5X320 F/S BD/BAP
118.117	FULL SPINE 3,5X320 F/S BD/BAPL
118.118	FULL SPINE 3,5X320 F/S BA/BAP
118.119	FULL SPINE 3,5X320 F/S BA/BAPL
118.120	FULL SPINE 3,5X320 F/S BAP/BAPL
118.121	FULL SPINE 3,5X360 F/S BD/BA
118.122	FULL SPINE 3,5X360 F/S BD/BAP
118.123	FULL SPINE 3,5X360 F/S BD/BAPL
118.124	FULL SPINE 3,5X360 F/S BA/BAP
118.125	FULL SPINE 3,5X360 F/S BA/BAPL
118.126	FULL SPINE 3,5X360 F/S BAP/BAPL
118.127	FULL SPINE 3,5X300 E/S BD/BA
118.128	FULL SPINE 3,5X300 E/S BD/BAP
118.129	FULL SPINE 3,5X300 E/S BD/BAPL
118.130	FULL SPINE 3,5X300 E/S BA/BAP
118.131	FULL SPINE 3,5X300 E/S BA/BAPL
118.132	FULL SPINE 3,5X300 E/S BAP/BAPL
118.133	FULL SPINE 3,5X320 E/S BD/BA
118.134	FULL SPINE 3,5X320 E/S BD/BAP
118.135	FULL SPINE 3,5X320 E/S BD/BAPL
118.136	FULL SPINE 3,5X320 E/S BA/BAP
118.137	FULL SPINE 3,5X320 E/S BA/BAPL
118.138	FULL SPINE 3,5X320 E/S BAP/BAPL
118.139	FULL SPINE 3,5X360 E/S BD/BA
118.140	FULL SPINE 3,5X360 E/S BD/BAP
118.141	FULL SPINE 3,5X360 E/S BD/BAPL
118.142	FULL SPINE 3,5X360 E/S BA/BAP
118.143	FULL SPINE 3,5X360 E/S BA/BAPL
118.144	FULL SPINE 3,5X360 E/S BAP/BAPL
118.145	FULL SPINE 3,5X300 L/S BD/BA
118.146	FULL SPINE 3,5X300 L/S BD/BAP
118.147	FULL SPINE 3,5X300 L/S BD/BAPL
118.148	FULL SPINE 3,5X300 L/S BA/BAP
118.149	FULL SPINE 3,5X300 L/S BA/BAPL



118.150	FULL SPINE 3,5X300 L/S BAP/BAPL
118.151	FULL SPINE 3,5X320 L/S BD/BA
118.152	FULL SPINE 3,5X320 L/S BD/BAP
118.153	FULL SPINE 3,5X320 L/S BD/BAPL
118.154	FULL SPINE 3,5X320 L/S BA/BAP
118.155	FULL SPINE 3,5X320 L/S BA/BAPL
118.156	FULL SPINE 3,5X320 L/S BAP/BAPL
118.157	FULL SPINE 3,5X360 L/S BD/BA
118.158	FULL SPINE 3,5X360 L/S BD/BAP
118.159	FULL SPINE 3,5X360 L/S BD/BAPL
118.160	FULL SPINE 3,5X360 L/S BA/BAP
118.161	FULL SPINE 3,5X360 L/S BA/BAPL
118.162	FULL SPINE 3,5X360 L/S BAP/BAPL
118.163	FULL SPINE 3,5X300 ST/S BD/BA
118.164	FULL SPINE 3,5X300 ST/S BD/BAP
118.165	FULL SPINE 3,5X300 ST/S BD/BAPL
118.166	FULL SPINE 3,5X300 ST/S BA/BAP
118.167	FULL SPINE 3,5X300 ST/S BA/BAPL
118.168	FULL SPINE 3,5X300 ST/S BAP/BAPL
118.169	FULL SPINE 3,5X320 ST/S BD/BA
118.170	FULL SPINE 3,5X320 ST/S BD/BAP
118.171	FULL SPINE 3,5X320 ST/S BD/BAPL
118.172	FULL SPINE 3,5X320 ST/S BA/BAP
118.173	FULL SPINE 3,5X320 ST/S BA/BAPL
118.174	FULL SPINE 3,5X320 ST/S BAP/BAPL
118.175	FULL SPINE 3,5X360 ST/S BD/BA
118.176	FULL SPINE 3,5X360 ST/S BD/BAP
118.177	FULL SPINE 3,5X360 ST/S BD/BAPL
118.178	FULL SPINE 3,5X360 ST/S BA/BAP
118.179	FULL SPINE 3,5X360 ST/S BA/BAPL
118.180	FULL SPINE 3,5X360 ST/S BAP/BAPL
118.181	FULL SPINE 3,5X300 R/R BD/BA
118.182	FULL SPINE 3,5X300 R/R BD/BAP
118.183	FULL SPINE 3,5X300 R/R BD/BAPL
118.184	FULL SPINE 3,5X300 R/R BA/BAP
118.185	FULL SPINE 3,5X300 R/R BA/BAPL
118.186	FULL SPINE 3,5X300 R/R BAP/BAPL
118.187	FULL SPINE 3,5X320 R/R BD/BA
118.188	FULL SPINE 3,5X320 R/R BD/BAP
118.189	FULL SPINE 3,5X320 R/R BD/BAPL
118.190	FULL SPINE 3,5X320 R/R BA/BAP
118.191	FULL SPINE 3,5X320 R/R BA/BAPL
118.192	FULL SPINE 3,5X320 R/R BAP/BAPL
118.193	FULL SPINE 3,5X360 R/R BD/BA
118.194	FULL SPINE 3,5X360 R/R BD/BAP
118.195	FULL SPINE 3,5X360 R/R BD/BAPL
118.196	FULL SPINE 3,5X360 R/R BA/BAP
118.197	FULL SPINE 3,5X360 R/R BA/BAPL
118.198	FULL SPINE 3,5X360 R/R BAP/BAPL
118.199	FULL SPINE 3,5X300 F/R BD/BA
118.200	FULL SPINE 3,5X300 F/R BD/BAP
118.201	FULL SPINE 3,5X300 F/R BD/BAPL
118.202	FULL SPINE 3,5X300 F/R BA/BAP
118.203	FULL SPINE 3,5X300 F/R BA/BAPL
118.204	FULL SPINE 3,5X300 F/R BAP/BAPL

118.205	FULL SPINE 3,5X320 F/R BD/BA
118.206	FULL SPINE 3,5X320 F/R BD/BAP
118.207	FULL SPINE 3,5X320 F/R BD/BAPL
118.208	FULL SPINE 3,5X320 F/R BA/BAP
118.209	FULL SPINE 3,5X320 F/R BA/BAPL
118.210	FULL SPINE 3,5X320 F/R BAP/BAPL
118.211	FULL SPINE 3,5X360 F/R BD/BA
118.212	FULL SPINE 3,5X360 F/R BD/BAP
118.213	FULL SPINE 3,5X360 F/R BD/BAPL
118.214	FULL SPINE 3,5X360 F/R BA/BAP
118.215	FULL SPINE 3,5X360 F/R BA/BAPL
118.216	FULL SPINE 3,5X360 F/R BAP/BAPL
118.217	FULL SPINE 3,5X300 E/R BD/BA
118.218	FULL SPINE 3,5X300 E/R BD/BAP
118.219	FULL SPINE 3,5X300 E/R BD/BAPL
118.220	FULL SPINE 3,5X300 E/R BA/BAP
118.221	FULL SPINE 3,5X300 E/R BA/BAPL
118.222	FULL SPINE 3,5X300 E/R BAP/BAPL
118.223	FULL SPINE 3,5X320 E/R BD/BA
118.224	FULL SPINE 3,5X320 E/R BD/BAP
118.225	FULL SPINE 3,5X320 E/R BD/BAPL
118.226	FULL SPINE 3,5X320 E/R BA/BAP
118.227	FULL SPINE 3,5X320 E/R BA/BAPL
118.228	FULL SPINE 3,5X320 E/R BAP/BAPL
118.229	FULL SPINE 3,5X360 E/R BD/BA
118.230	FULL SPINE 3,5X360 E/R BD/BAP
118.231	FULL SPINE 3,5X360 E/R BD/BAPL
118.232	FULL SPINE 3,5X360 E/R BA/BAP
118.233	FULL SPINE 3,5X360 E/R BA/BAPL
118.234	FULL SPINE 3,5X360 E/R BAP/BAPL
118.235	FULL SPINE 3,5X300 L/R BD/BA
118.236	FULL SPINE 3,5X300 L/R BD/BAP
118.237	FULL SPINE 3,5X300 L/R BD/BAPL
118.238	FULL SPINE 3,5X300 L/R BA/BAP
118.239	FULL SPINE 3,5X300 L/R BA/BAPL
118.240	FULL SPINE 3,5X300 L/R BAP/BAPL
118.241	FULL SPINE 3,5X320 L/R BD/BA
118.242	FULL SPINE 3,5X320 L/R BD/BAP
118.243	FULL SPINE 3,5X320 L/R BD/BAPL
118.244	FULL SPINE 3,5X320 L/R BA/BAP
118.245	FULL SPINE 3,5X320 L/R BA/BAPL
118.246	FULL SPINE 3,5X320 L/R BAP/BAPL
118.247	FULL SPINE 3,5X360 L/R BD/BA
118.248	FULL SPINE 3,5X360 L/R BD/BAP
118.249	FULL SPINE 3,5X360 L/R BD/BAPL
118.250	FULL SPINE 3,5X360 L/R BA/BAP
118.251	FULL SPINE 3,5X360 L/R BA/BAPL
118.252	FULL SPINE 3,5X360 L/R BAP/BAPL
118.253	FULL SPINE 3,5X300 ST/R BD/BA
118.254	FULL SPINE 3,5X300 ST/R BD/BAP
118.255	FULL SPINE 3,5X300 ST/R BD/BAPL
118.256	FULL SPINE 3,5X300 ST/R BA/BAP
118.257	FULL SPINE 3,5X300 ST/R BA/BAPL
118.258	FULL SPINE 3,5X300 ST/R BAP/BAPL
118.259	FULL SPINE 3,5X320 ST/R BD/BA



118.260	FULL SPINE 3,5X320 ST/R BD/BAP
118.261	FULL SPINE 3,5X320 ST/R BD/BAPL
118.262	FULL SPINE 3,5X320 ST/R BA/BAP
118.263	FULL SPINE 3,5X320 ST/R BA/BAPL
118.264	FULL SPINE 3,5X320 ST/R BAP/BAPL
118.265	FULL SPINE 3,5X360 ST/R BD/BA
118.266	FULL SPINE 3,5X360 ST/R BD/BAP
118.267	FULL SPINE 3,5X360 ST/R BD/BAPL
118.268	FULL SPINE 3,5X360 ST/R BA/BAP
118.269	FULL SPINE 3,5X360 ST/R BA/BAPL
118.270	FULL SPINE 3,5X360 ST/R BAP/BAPL