

NOME COMERCIAL: FLEX SPINE

Nome Técnico: Kit Cirúrgico

ANVISA nº 80989250038

Fabricante:

R3A Medical Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

Endereço: Av. Antonio Martinez Carrera Filho, 72 – CEAT CEP 13.573-420 – São Carlos – SP.

CNPJ: 14.697.578/0001-53 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Telefone: (16) 2180-3383

E-mail: contato@r3amedical.com

Responsável Técnico: Lígia Archiza Plaine – CRF/SP 88541

– **PRODUTO ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO (ETO) –**
– **REPROCESSAMENTO PROIBIDO –**



Antes da utilização do produto, o usuário deve ler atentamente as instruções de uso, as quais irão auxiliar o uso correto e seguro, protegendo contra possíveis riscos.

INDICAÇÃO DE USO

O Flex Spine é um kit com cânulas indicado para procedimentos de descompressão de hérnia de disco intervertebral (dissectomia percutânea) desde o nível cervical até o L5/S1, anuloplastia, anulotomia, nucleoplastia, por exemplo.

Possui uma cânula bipolar de coluna que, a base de energia enviada por um gerador eletrocirúrgico ao paciente, permite a realização de procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos da coluna, aplicado no disco intervertebral.

Deve ser utilizado em conjunto com irrigação de solução salina que permitem a formação de plasma na ponta do dispositivo e, assim, promovam o processo de ablação, coagulação e hemostasia pelo aumento da temperatura local.

FORMA DE APRESENTAÇÃO

O Flex Spine é um kit cirúrgico que possui os seguintes componentes:

- 1 unidade: Cânula bipolar de coluna;
- 1 unidade: Cânula de punção;
- 1 unidade: Fio guia com empurrador;
- 1 unidade: Cânula de punção sonovisível;
- 2 unidades: Cânulas de debridação;
- 1 unidade: Equipo de irrigação.

Os materiais que compõem o produto são: aço inoxidável, polímero poliuretano atóxico, polipropileno atóxico, poliacetal, copolímero ABS, liga de alumínio, silicone atóxico e PVC atóxico.

FINALIDADE

A finalidade do dispositivo médico é possibilitar o acesso percutâneo seguro, a partir do fio guia, da cânula de punção sonovisível e da cânula de punção. O corte, desbaste e debridação óssea é promovido pelas cânulas de debridação. Já o equipo de irrigação permite a distensão tecidual e formação de plasma a partir da solução salina irrigada. A ablação, coagulação ou hemostasia no disco intervertebral ocorre quando a Cânula bipolar de coluna, que compõe o kit cirúrgico, é conectada ao gerador eletrocirúrgico, inserida na cavidade de acesso da cirurgia endoscópica de coluna e acionada.

Destina-se aos médicos cirurgiões devidamente qualificados, familiarizados e treinados com o produto e com a técnica e/ou procedimento cirúrgico escolhido.

ESTERILIZAÇÃO

O dispositivo médico é fornecido ESTÉRIL. O método de esterilização utilizado é ETO (Óxido de Etileno), em concordância com a norma ABNT NBR ISO 11135, possuindo validade de 3 anos a partir da data de esterilização, caso a embalagem não esteja violada.

REPROCESSAMENTO PROIBIDO

O dispositivo médico é de reprocessamento proibido. Seu descarte é feito em LIXO HOSPITALAR, conforme legislação vigente.

MODO DE UTILIZAÇÃO

1. Verificar se a embalagem não está danificada;
2. Verificar se o prazo de validade e a indicação da esterilização estão corretos;
3. Seu manuseio deve ser realizado somente por profissionais da área médico-hospitalar devidamente habilitados e familiarizados com as técnicas e procedimentos que envolvem seu uso;
4. Abrir a embalagem e retirar o produto, seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis;
5. Utilizar conforme protocolo médico escolhido;
6. Conectar a cânula bipolar ao gerador eletrocirúrgico compatível (NÃO INCLUSO) de forma adequada e segura;
7. Inserir a haste da cânula na cavidade de acesso da cirurgia com sua parte distal chegando até o disco intervertebral;
8. A empunhadoura deve ser pressionada para a projeção da ponta ativa e, por meio da condução elétrica promovida pelo fluido condutor que é irrigado à cavidade, ao ser ativado pelo pedal ou diretamente pelo gerador eletrocirúrgico, fornece energia térmica na ponta ativa ao tecido mole alvo da ablação, coagulação ou hemostasia.
9. A potência máxima no gerador eletrocirúrgico é de 40 W e a tensão máxima de entrada é de 300 V. Deve ser acionado de maneira intermitente, ou seja, entregar energia continuamente durante 5 segundos e ter intervalo de 10 segundos entre uma ativação e outra.
10. Após o procedimento, inutilizar e descartar os produtos em LIXO HOSPITALAR, conforme legislação sanitária vigente.

VALIDADE

O prazo de validade do dispositivo médico é de 3 anos após a data de esterilização.

APÓS ABERTO, UTILIZAR IMEDIATAMENTE.

ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar produtos fora da data de validade;
- NÃO utilize caso a embalagem esteja danificada, rasgada ou furada;
- Manipular os instrumentais com cuidado para que não haja perfuração nas luvas cirúrgicas e/ou paramentação cirúrgica;
- Não deve ser utilizada cânula de acesso que conduza energia, pois pode transmitir energia em locais indesejados;
- O dispositivo médico não deve se aproximar de líquidos ou gases inflamáveis, nem mesmo ser utilizado em ambiente com alta concentração de oxigênio;
- O procedimento cirúrgico deve ser realizado em meios endoscópicos com circulação de solução condutora, como soro fisiológico, por exemplo;
- Somente acionar a ponta ativa da cânula bipolar quando esta estiver no local correto para aplicação da energia;
- O produto é de REPROCESSAMENTO PROIBIDO, e seu descarte deve ser feito em lixo hospitalar, conforme legislação sanitária vigente.

PRECAUÇÕES

- Antes da utilização do produto, o usuário deve ler atentamente as instruções de uso, as quais irão auxiliar o uso correto e seguro, protegendo contra possíveis riscos;
- A embalagem estéril deverá ser aberta dentro do centro cirúrgico, por profissionais qualificados, para que não haja riscos de contaminação;
- O produto deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados e familiarizados com a técnica cirúrgica;
- Verificar a integridade da embalagem, especialmente a primária, e do produto antes do uso. Caso a embalagem apresente danos, como rasgos, furos ou violação, ou o dispositivo apresente defeitos visíveis, o mesmo deve ser descaracterizado, descartado e o fabricante ou distribuidor deve ser notificado;

- Se o dispositivo médico cair no chão, o mesmo deve ser descaracterizado e descartado;
- Verificar a conexão da cânula bipolar com o gerador eletrocirúrgico antes da utilização;
- Não exercer força excessiva durante o manuseio dos instrumentais. A pressão excessiva pode provocar danos em estruturas anatômicas e/ou nos tecidos.

CONTRAINDICAÇÕES

- Utilização em pacientes que tenham alergia a algum dos materiais que compõem o dispositivo médico;
- Pacientes que possuam implante eletrônico ativo, como marca-passos, por exemplo;
- Infecção local ou sistêmica ativa;
- Herniação de disco calcificada;
- Graves alterações degenerativas das articulações intervertebrais, colapso da altura do disco e Doença Degenerativa do Disco (DDD);
- Fragmento herniário sequestrado;
- Instabilidade segmentar significativa da coluna;
- Limitação de acessibilidade dos instrumentais por fatores anatômicos.

EVENTOS ADVERSOS

- Reações alérgicas;
- Lesão nervosa local, transitória ou permanente;
- Paresia e/ou disestesia, pela pressão prolongada do fluido de irrigação;
- Ruptura dural;
- Infecção pós-operatória;
- Sepsia;
- Hematoma;
- Trombose venosa;
- Embolia pulmonar;
- Distúrbios cardiovasculares;
- Dores residuais localizadas;
- Recidiva da hérnia discal;
- Danos térmicos a estruturas neurais;

- Queimaduras no paciente e no usuário, caso acionado acidental ou propositalmente em local inadequado, ou em caso de fuga de corrente em condições normais de uso;
- A ativação prolongada da ponta ativa por tempo superior ao indicado sem as pausas por tempo suficiente pode sobrecarregar a barreira de isolamento elétrico, levando-a a falha e consequente fuga de corrente.

ARMAZENAMENTO

- O transporte da embalagem contendo o produto deve ser feita com cuidado e armazenada em local seco, arejado e ao abrigo da luz;
- O produto deve ser mantido em embalagem original até o momento de sua utilização, sendo armazenado em local limpo, fresco, seco e longe de substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas;
- Não utilize caso a embalagem estiver rasgada, furada, danificada ou violada. A esterilidade não é válida se a embalagem protetora estiver violada;
- Não coloque sob pesos ou volumes, pois poderão danificar e comprometer a integridade e/ou qualidade do produto;
- Temperatura de 10 °C a 45 °C / Umidade Relativa de 30% a 75% (sem condensação).

TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado e acondicionado de forma a protegê-lo contra qualquer intempérie;
- A embalagem não deve estar furada, rasgada ou com algum tipo de dano, o que pode comprometer a integridade e qualidade do produto. Deve ser armazenada ao abrigo da luz, umidade, calor e sujidades;
- Não coloque sob pesos ou volumes, pois poderão danificar e comprometer a integridade e/ou qualidade do produto;
- Temperatura de 10 °C a 45 °C / Umidade Relativa de 30% a 75% (sem condensação).

DESCARTE

- Inutilizar e descartar o produto caso sua integridade tenha sido comprometida, durante o transporte, armazenamento e/ou manuseio inadequados.

- Inutilizar caso a embalagem estiver violada ou fora do prazo de validade, pois a esterilidade não será válida.
- Inutilizar após realização do procedimento médico escolhido. REPROCESSAMENTO PROIBIDO.

DESCARTAR O PRODUTO CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA LOCAL.

RASTREABILIDADE

O produto contém em sua etiqueta de rótulo e nas etiquetas de rastreabilidade que acompanham o produto todas as informações necessárias e requeridas que irão possibilitar sua rastreabilidade, caso seja necessário.

GARANTIA

A R3A Medical oferece a garantia de seus produtos por 6 meses, contra defeitos de fabricação. Essa garantia NÃO cobre defeitos que surjam devido ao transporte, armazenamento e/ou manipulação inadequados.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Caso o produto médico esteja fora de suas especificações descritas nesta instrução de uso e/ou esteja gerando quaisquer insatisfações, notifique diretamente a R3A Medical. Identifique e descreva a não conformidade para: Av. Antonio Martinez Carrera Filho, 72 – CEAT CEP 13.573-420 – São Carlos – SP, telefone – (16) 2180-3383, e-mail: contato@r3amedical.com.

MODELOS COMERCIAIS

Código	Descrição	Código	Descrição
117.001	FLEX SPINE 3,5X250 R/L BD	117.053	FLEX SPINE 5,0X300 F/L BD
117.002	FLEX SPINE 3,5X250 R/L BA	117.054	FLEX SPINE 5,0X300 F/L BA
117.003	FLEX SPINE 3,5X250 R/L BAP	117.055	FLEX SPINE 5,0X300 F/L BAP
117.004	FLEX SPINE 3,5X250 R/L BAPL	117.056	FLEX SPINE 5,0X300 F/L BAPL
117.005	FLEX SPINE 3,5X300 R/L BD	117.057	FLEX SPINE 5,0X320 F/L BD
117.006	FLEX SPINE 3,5X300 R/L BA	117.058	FLEX SPINE 5,0X320 F/L BA
117.007	FLEX SPINE 3,5X300 R/L BAP	117.059	FLEX SPINE 5,0X320 F/L BAP
117.008	FLEX SPINE 3,5X300 R/L BAPL	117.060	FLEX SPINE 5,0X320 F/L BAPL
117.009	FLEX SPINE 3,5X320 R/L BD	117.061	FLEX SPINE 5,0X360 F/L BD
117.010	FLEX SPINE 3,5X320 R/L BA	117.062	FLEX SPINE 5,0X360 F/L BA
117.011	FLEX SPINE 3,5X320 R/L BAP	117.063	FLEX SPINE 5,0X360 F/L BAP
117.012	FLEX SPINE 3,5X320 R/L BAPL	117.064	FLEX SPINE 5,0X360 F/L BAPL
117.013	FLEX SPINE 3,5X360 R/L BD	117.065	FLEX SPINE 3,5X250 E/L BD
117.014	FLEX SPINE 3,5X360 R/L BA	117.066	FLEX SPINE 3,5X250 E/L BA
117.015	FLEX SPINE 3,5X360 R/L BAP	117.067	FLEX SPINE 3,5X250 E/L BAP
117.016	FLEX SPINE 3,5X360 R/L BAPL	117.068	FLEX SPINE 3,5X250 E/L BAPL
117.017	FLEX SPINE 5,0X250 R/L BD	117.069	FLEX SPINE 3,5X300 E/L BD
117.018	FLEX SPINE 5,0X250 R/L BA	117.070	FLEX SPINE 3,5X300 E/L BA
117.019	FLEX SPINE 5,0X250 R/L BAP	117.071	FLEX SPINE 3,5X300 E/L BAP
117.020	FLEX SPINE 5,0X250 R/L BAPL	117.072	FLEX SPINE 3,5X300 E/L BAPL
117.021	FLEX SPINE 5,0X300 R/L BD	117.073	FLEX SPINE 3,5X320 E/L BD
117.022	FLEX SPINE 5,0X300 R/L BA	117.074	FLEX SPINE 3,5X320 E/L BA
117.023	FLEX SPINE 5,0X300 R/L BAP	117.075	FLEX SPINE 3,5X320 E/L BAP
117.024	FLEX SPINE 5,0X300 R/L BAPL	117.076	FLEX SPINE 3,5X320 E/L BAPL
117.025	FLEX SPINE 5,0X320 R/L BD	117.077	FLEX SPINE 3,5X360 E/L BD
117.026	FLEX SPINE 5,0X320 R/L BA	117.078	FLEX SPINE 3,5X360 E/L BA
117.027	FLEX SPINE 5,0X320 R/L BAP	117.079	FLEX SPINE 3,5X360 E/L BAP
117.028	FLEX SPINE 5,0X320 R/L BAPL	117.080	FLEX SPINE 3,5X360 E/L BAPL
117.029	FLEX SPINE 5,0X360 R/L BD	117.081	FLEX SPINE 5,0X250 E/L BD
117.030	FLEX SPINE 5,0X360 R/L BA	117.082	FLEX SPINE 5,0X250 E/L BA
117.031	FLEX SPINE 5,0X360 R/L BAP	117.083	FLEX SPINE 5,0X250 E/L BAP
117.032	FLEX SPINE 5,0X360 R/L BAPL	117.084	FLEX SPINE 5,0X250 E/L BAPL
117.033	FLEX SPINE 3,5X250 F/L BD	117.085	FLEX SPINE 5,0X300 E/L BD
117.034	FLEX SPINE 3,5X250 F/L BA	117.086	FLEX SPINE 5,0X300 E/L BA
117.035	FLEX SPINE 3,5X250 F/L BAP	117.087	FLEX SPINE 5,0X300 E/L BAP
117.036	FLEX SPINE 3,5X250 F/L BAPL	117.088	FLEX SPINE 5,0X300 E/L BAPL
117.037	FLEX SPINE 3,5X300 F/L BD	117.089	FLEX SPINE 5,0X320 E/L BD
117.038	FLEX SPINE 3,5X300 F/L BA	117.090	FLEX SPINE 5,0X320 E/L BA
117.039	FLEX SPINE 3,5X300 F/L BAP	117.091	FLEX SPINE 5,0X320 E/L BAP
117.040	FLEX SPINE 3,5X300 F/L BAPL	117.092	FLEX SPINE 5,0X320 E/L BAPL
117.041	FLEX SPINE 3,5X320 F/L BD	117.093	FLEX SPINE 5,0X360 E/L BD
117.042	FLEX SPINE 3,5X320 F/L BA	117.094	FLEX SPINE 5,0X360 E/L BA
117.043	FLEX SPINE 3,5X320 F/L BAP	117.095	FLEX SPINE 5,0X360 E/L BAP
117.044	FLEX SPINE 3,5X320 F/L BAPL	117.096	FLEX SPINE 5,0X360 E/L BAPL
117.045	FLEX SPINE 3,5X360 F/L BD	117.097	FLEX SPINE 3,5X250 L/L BD
117.046	FLEX SPINE 3,5X360 F/L BA	117.098	FLEX SPINE 3,5X250 L/L BA
117.047	FLEX SPINE 3,5X360 F/L BAP	117.099	FLEX SPINE 3,5X250 L/L BAP
117.048	FLEX SPINE 3,5X360 F/L BAPL	117.100	FLEX SPINE 3,5X250 L/L BAPL
117.049	FLEX SPINE 5,0X250 F/L BD	117.101	FLEX SPINE 3,5X300 L/L BD
117.050	FLEX SPINE 5,0X250 F/L BA	117.102	FLEX SPINE 3,5X300 L/L BA
117.051	FLEX SPINE 5,0X250 F/L BAP	117.103	FLEX SPINE 3,5X300 L/L BAP
117.052	FLEX SPINE 5,0X250 F/L BAPL	117.104	FLEX SPINE 3,5X300 L/L BAPL

117.105	FLEX SPINE 3,5X320 L/L BD	117.160	FLEX SPINE 5,0X360 ST/L BAPL
117.106	FLEX SPINE 3,5X320 L/L BA	117.161	FLEX SPINE 3,5X250 R/S BD
117.107	FLEX SPINE 3,5X320 L/L BAP	117.162	FLEX SPINE 3,5X250 R/S BA
117.108	FLEX SPINE 3,5X320 L/L BAPL	117.163	FLEX SPINE 3,5X250 R/S BAP
117.109	FLEX SPINE 3,5X360 L/L BD	117.164	FLEX SPINE 3,5X250 R/S BAPL
117.110	FLEX SPINE 3,5X360 L/L BA	117.165	FLEX SPINE 3,5X300 R/S BD
117.111	FLEX SPINE 3,5X360 L/L BAP	117.166	FLEX SPINE 3,5X300 R/S BA
117.112	FLEX SPINE 3,5X360 L/L BAPL	117.167	FLEX SPINE 3,5X300 R/S BAP
117.113	FLEX SPINE 5,0X250 L/L BD	117.168	FLEX SPINE 3,5X300 R/S BAPL
117.114	FLEX SPINE 5,0X250 L/L BA	117.169	FLEX SPINE 3,5X320 R/S BD
117.115	FLEX SPINE 5,0X250 L/L BAP	117.170	FLEX SPINE 3,5X320 R/S BA
117.116	FLEX SPINE 5,0X250 L/L BAPL	117.171	FLEX SPINE 3,5X320 R/S BAP
117.117	FLEX SPINE 5,0X300 L/L BD	117.172	FLEX SPINE 3,5X320 R/S BAPL
117.118	FLEX SPINE 5,0X300 L/L BA	117.173	FLEX SPINE 3,5X360 R/S BD
117.119	FLEX SPINE 5,0X300 L/L BAP	117.174	FLEX SPINE 3,5X360 R/S BA
117.120	FLEX SPINE 5,0X300 L/L BAPL	117.175	FLEX SPINE 3,5X360 R/S BAP
117.121	FLEX SPINE 5,0X320 L/L BD	117.176	FLEX SPINE 3,5X360 R/S BAPL
117.122	FLEX SPINE 5,0X320 L/L BA	117.177	FLEX SPINE 5,0X250 R/S BD
117.123	FLEX SPINE 5,0X320 L/L BAP	117.178	FLEX SPINE 5,0X250 R/S BA
117.124	FLEX SPINE 5,0X320 L/L BAPL	117.179	FLEX SPINE 5,0X250 R/S BAP
117.125	FLEX SPINE 5,0X360 L/L BD	117.180	FLEX SPINE 5,0X250 R/S BAPL
117.126	FLEX SPINE 5,0X360 L/L BA	117.181	FLEX SPINE 5,0X300 R/S BD
117.127	FLEX SPINE 5,0X360 L/L BAP	117.182	FLEX SPINE 5,0X300 R/S BA
117.128	FLEX SPINE 5,0X360 L/L BAPL	117.183	FLEX SPINE 5,0X300 R/S BAP
117.129	FLEX SPINE 3,5X250 ST/L BD	117.184	FLEX SPINE 5,0X300 R/S BAPL
117.130	FLEX SPINE 3,5X250 ST/L BA	117.185	FLEX SPINE 5,0X320 R/S BD
117.131	FLEX SPINE 3,5X250 ST/L BAP	117.186	FLEX SPINE 5,0X320 R/S BA
117.132	FLEX SPINE 3,5X250 ST/L BAPL	117.187	FLEX SPINE 5,0X320 R/S BAP
117.133	FLEX SPINE 3,5X300 ST/L BD	117.188	FLEX SPINE 5,0X320 R/S BAPL
117.134	FLEX SPINE 3,5X300 ST/L BA	117.189	FLEX SPINE 5,0X360 R/S BD
117.135	FLEX SPINE 3,5X300 ST/L BAP	117.190	FLEX SPINE 5,0X360 R/S BA
117.136	FLEX SPINE 3,5X300 ST/L BAPL	117.191	FLEX SPINE 5,0X360 R/S BAP
117.137	FLEX SPINE 3,5X320 ST/L BD	117.192	FLEX SPINE 5,0X360 R/S BAPL
117.138	FLEX SPINE 3,5X320 ST/L BA	117.193	FLEX SPINE 3,5X250 F/S BD
117.139	FLEX SPINE 3,5X320 ST/L BAP	117.194	FLEX SPINE 3,5X250 F/S BA
117.140	FLEX SPINE 3,5X320 ST/L BAPL	117.195	FLEX SPINE 3,5X250 F/S BAP
117.141	FLEX SPINE 3,5X360 ST/L BD	117.196	FLEX SPINE 3,5X250 F/S BAPL
117.142	FLEX SPINE 3,5X360 ST/L BA	117.197	FLEX SPINE 3,5X300 F/S BD
117.143	FLEX SPINE 3,5X360 ST/L BAP	117.198	FLEX SPINE 3,5X300 F/S BA
117.144	FLEX SPINE 3,5X360 ST/L BAPL	117.199	FLEX SPINE 3,5X300 F/S BAP
117.145	FLEX SPINE 5,0X250 ST/L BD	117.200	FLEX SPINE 3,5X300 F/S BAPL
117.146	FLEX SPINE 5,0X250 ST/L BA	117.201	FLEX SPINE 3,5X320 F/S BD
117.147	FLEX SPINE 5,0X250 ST/L BAP	117.202	FLEX SPINE 3,5X320 F/S BA
117.148	FLEX SPINE 5,0X250 ST/L BAPL	117.203	FLEX SPINE 3,5X320 F/S BAP
117.149	FLEX SPINE 5,0X300 ST/L BD	117.204	FLEX SPINE 3,5X320 F/S BAPL
117.150	FLEX SPINE 5,0X300 ST/L BA	117.205	FLEX SPINE 3,5X360 F/S BD
117.151	FLEX SPINE 5,0X300 ST/L BAP	117.206	FLEX SPINE 3,5X360 F/S BA
117.152	FLEX SPINE 5,0X300 ST/L BAPL	117.207	FLEX SPINE 3,5X360 F/S BAP
117.153	FLEX SPINE 5,0X320 ST/L BD	117.208	FLEX SPINE 3,5X360 F/S BAPL
117.154	FLEX SPINE 5,0X320 ST/L BA	117.209	FLEX SPINE 5,0X250 F/S BD
117.155	FLEX SPINE 5,0X320 ST/L BAP	117.210	FLEX SPINE 5,0X250 F/S BA
117.156	FLEX SPINE 5,0X320 ST/L BAPL	117.211	FLEX SPINE 5,0X250 F/S BAP
117.157	FLEX SPINE 5,0X360 ST/L BD	117.212	FLEX SPINE 5,0X250 F/S BAPL
117.158	FLEX SPINE 5,0X360 ST/L BA	117.213	FLEX SPINE 5,0X300 F/S BD
117.159	FLEX SPINE 5,0X360 ST/L BAP	117.214	FLEX SPINE 5,0X300 F/S BA

117.215	FLEX SPINE 5,0X300 F/S BAP	117.270	FLEX SPINE 3,5X360 L/S BA
117.216	FLEX SPINE 5,0X300 F/S BAPL	117.271	FLEX SPINE 3,5X360 L/S BAP
117.217	FLEX SPINE 5,0X320 F/S BD	117.272	FLEX SPINE 3,5X360 L/S BAPL
117.218	FLEX SPINE 5,0X320 F/S BA	117.273	FLEX SPINE 5,0X250 L/S BD
117.219	FLEX SPINE 5,0X320 F/S BAP	117.274	FLEX SPINE 5,0X250 L/S BA
117.220	FLEX SPINE 5,0X320 F/S BAPL	117.275	FLEX SPINE 5,0X250 L/S BAP
117.221	FLEX SPINE 5,0X360 F/S BD	117.276	FLEX SPINE 5,0X250 L/S BAPL
117.222	FLEX SPINE 5,0X360 F/S BA	117.277	FLEX SPINE 5,0X300 L/S BD
117.223	FLEX SPINE 5,0X360 F/S BAP	117.278	FLEX SPINE 5,0X300 L/S BA
117.224	FLEX SPINE 5,0X360 F/S BAPL	117.279	FLEX SPINE 5,0X300 L/S BAP
117.225	FLEX SPINE 3,5X250 E/S BD	117.280	FLEX SPINE 5,0X300 L/S BAPL
117.226	FLEX SPINE 3,5X250 E/S BA	117.281	FLEX SPINE 5,0X320 L/S BD
117.227	FLEX SPINE 3,5X250 E/S BAP	117.282	FLEX SPINE 5,0X320 L/S BA
117.228	FLEX SPINE 3,5X250 E/S BAPL	117.283	FLEX SPINE 5,0X320 L/S BAP
117.229	FLEX SPINE 3,5X300 E/S BD	117.284	FLEX SPINE 5,0X320 L/S BAPL
117.230	FLEX SPINE 3,5X300 E/S BA	117.285	FLEX SPINE 5,0X360 L/S BD
117.231	FLEX SPINE 3,5X300 E/S BAP	117.286	FLEX SPINE 5,0X360 L/S BA
117.232	FLEX SPINE 3,5X300 E/S BAPL	117.287	FLEX SPINE 5,0X360 L/S BAP
117.233	FLEX SPINE 3,5X320 E/S BD	117.288	FLEX SPINE 5,0X360 L/S BAPL
117.234	FLEX SPINE 3,5X320 E/S BA	117.289	FLEX SPINE 3,5X250 ST/S BD
117.235	FLEX SPINE 3,5X320 E/S BAP	117.290	FLEX SPINE 3,5X250 ST/S BA
117.236	FLEX SPINE 3,5X320 E/S BAPL	117.291	FLEX SPINE 3,5X250 ST/S BAP
117.237	FLEX SPINE 3,5X360 E/S BD	117.292	FLEX SPINE 3,5X250 ST/S BAPL
117.238	FLEX SPINE 3,5X360 E/S BA	117.293	FLEX SPINE 3,5X300 ST/S BD
117.239	FLEX SPINE 3,5X360 E/S BAP	117.294	FLEX SPINE 3,5X300 ST/S BA
117.240	FLEX SPINE 3,5X360 E/S BAPL	117.295	FLEX SPINE 3,5X300 ST/S BAP
117.241	FLEX SPINE 5,0X250 E/S BD	117.296	FLEX SPINE 3,5X300 ST/S BAPL
117.242	FLEX SPINE 5,0X250 E/S BA	117.297	FLEX SPINE 3,5X320 ST/S BD
117.243	FLEX SPINE 5,0X250 E/S BAP	117.298	FLEX SPINE 3,5X320 ST/S BA
117.244	FLEX SPINE 5,0X250 E/S BAPL	117.299	FLEX SPINE 3,5X320 ST/S BAP
117.245	FLEX SPINE 5,0X300 E/S BD	117.300	FLEX SPINE 3,5X320 ST/S BAPL
117.246	FLEX SPINE 5,0X300 E/S BA	117.301	FLEX SPINE 3,5X360 ST/S BD
117.247	FLEX SPINE 5,0X300 E/S BAP	117.302	FLEX SPINE 3,5X360 ST/S BA
117.248	FLEX SPINE 5,0X300 E/S BAPL	117.303	FLEX SPINE 3,5X360 ST/S BAP
117.249	FLEX SPINE 5,0X320 E/S BD	117.304	FLEX SPINE 3,5X360 ST/S BAPL
117.250	FLEX SPINE 5,0X320 E/S BA	117.305	FLEX SPINE 5,0X250 ST/S BD
117.251	FLEX SPINE 5,0X320 E/S BAP	117.306	FLEX SPINE 5,0X250 ST/S BA
117.252	FLEX SPINE 5,0X320 E/S BAPL	117.307	FLEX SPINE 5,0X250 ST/S BAP
117.253	FLEX SPINE 5,0X360 E/S BD	117.308	FLEX SPINE 5,0X250 ST/S BAPL
117.254	FLEX SPINE 5,0X360 E/S BA	117.309	FLEX SPINE 5,0X300 ST/S BD
117.255	FLEX SPINE 5,0X360 E/S BAP	117.310	FLEX SPINE 5,0X300 ST/S BA
117.256	FLEX SPINE 5,0X360 E/S BAPL	117.311	FLEX SPINE 5,0X300 ST/S BAP
117.257	FLEX SPINE 3,5X250 L/S BD	117.312	FLEX SPINE 5,0X300 ST/S BAPL
117.258	FLEX SPINE 3,5X250 L/S BA	117.313	FLEX SPINE 5,0X320 ST/S BD
117.259	FLEX SPINE 3,5X250 L/S BAP	117.314	FLEX SPINE 5,0X320 ST/S BA
117.260	FLEX SPINE 3,5X250 L/S BAPL	117.315	FLEX SPINE 5,0X320 ST/S BAP
117.261	FLEX SPINE 3,5X300 L/S BD	117.316	FLEX SPINE 5,0X320 ST/S BAPL
117.262	FLEX SPINE 3,5X300 L/S BA	117.317	FLEX SPINE 5,0X360 ST/S BD
117.263	FLEX SPINE 3,5X300 L/S BAP	117.318	FLEX SPINE 5,0X360 ST/S BA
117.264	FLEX SPINE 3,5X300 L/S BAPL	117.319	FLEX SPINE 5,0X360 ST/S BAP
117.265	FLEX SPINE 3,5X320 L/S BD	117.320	FLEX SPINE 5,0X360 ST/S BAPL
117.266	FLEX SPINE 3,5X320 L/S BA	117.321	FLEX SPINE 3,5X250 R/R BD
117.267	FLEX SPINE 3,5X320 L/S BAP	117.322	FLEX SPINE 3,5X250 R/R BA
117.268	FLEX SPINE 3,5X320 L/S BAPL	117.323	FLEX SPINE 3,5X250 R/R BAP
117.269	FLEX SPINE 3,5X360 L/S BD	117.324	FLEX SPINE 3,5X250 R/R BAPL

117.325	FLEX SPINE 3,5X300 R/R BD	117.380	FLEX SPINE 5,0X320 F/R BAPL
117.326	FLEX SPINE 3,5X300 R/R BA	117.381	FLEX SPINE 5,0X360 F/R BD
117.327	FLEX SPINE 3,5X300 R/R BAP	117.382	FLEX SPINE 5,0X360 F/R BA
117.328	FLEX SPINE 3,5X300 R/R BAPL	117.383	FLEX SPINE 5,0X360 F/R BAP
117.329	FLEX SPINE 3,5X320 R/R BD	117.384	FLEX SPINE 5,0X360 F/R BAPL
117.330	FLEX SPINE 3,5X320 R/R BA	117.385	FLEX SPINE 3,5X250 E/R BD
117.331	FLEX SPINE 3,5X320 R/R BAP	117.386	FLEX SPINE 3,5X250 E/R BA
117.332	FLEX SPINE 3,5X320 R/R BAPL	117.387	FLEX SPINE 3,5X250 E/R BAP
117.333	FLEX SPINE 3,5X360 R/R BD	117.388	FLEX SPINE 3,5X250 E/R BAPL
117.334	FLEX SPINE 3,5X360 R/R BA	117.389	FLEX SPINE 3,5X300 E/R BD
117.335	FLEX SPINE 3,5X360 R/R BAP	117.390	FLEX SPINE 3,5X300 E/R BA
117.336	FLEX SPINE 3,5X360 R/R BAPL	117.391	FLEX SPINE 3,5X300 E/R BAP
117.337	FLEX SPINE 5,0X250 R/R BD	117.392	FLEX SPINE 3,5X300 E/R BAPL
117.338	FLEX SPINE 5,0X250 R/R BA	117.393	FLEX SPINE 3,5X320 E/R BD
117.339	FLEX SPINE 5,0X250 R/R BAP	117.394	FLEX SPINE 3,5X320 E/R BA
117.340	FLEX SPINE 5,0X250 R/R BAPL	117.395	FLEX SPINE 3,5X320 E/R BAP
117.341	FLEX SPINE 5,0X300 R/R BD	117.396	FLEX SPINE 3,5X320 E/R BAPL
117.342	FLEX SPINE 5,0X300 R/R BA	117.397	FLEX SPINE 3,5X360 E/R BD
117.343	FLEX SPINE 5,0X300 R/R BAP	117.398	FLEX SPINE 3,5X360 E/R BA
117.344	FLEX SPINE 5,0X300 R/R BAPL	117.399	FLEX SPINE 3,5X360 E/R BAP
117.345	FLEX SPINE 5,0X320 R/R BD	117.400	FLEX SPINE 3,5X360 E/R BAPL
117.346	FLEX SPINE 5,0X320 R/R BA	117.401	FLEX SPINE 5,0X250 E/R BD
117.347	FLEX SPINE 5,0X320 R/R BAP	117.402	FLEX SPINE 5,0X250 E/R BA
117.348	FLEX SPINE 5,0X320 R/R BAPL	117.403	FLEX SPINE 5,0X250 E/R BAP
117.349	FLEX SPINE 5,0X360 R/R BD	117.404	FLEX SPINE 5,0X250 E/R BAPL
117.350	FLEX SPINE 5,0X360 R/R BA	117.405	FLEX SPINE 5,0X300 E/R BD
117.351	FLEX SPINE 5,0X360 R/R BAP	117.406	FLEX SPINE 5,0X300 E/R BA
117.352	FLEX SPINE 5,0X360 R/R BAPL	117.407	FLEX SPINE 5,0X300 E/R BAP
117.353	FLEX SPINE 3,5X250 F/R BD	117.408	FLEX SPINE 5,0X300 E/R BAPL
117.354	FLEX SPINE 3,5X250 F/R BA	117.409	FLEX SPINE 5,0X320 E/R BD
117.355	FLEX SPINE 3,5X250 F/R BAP	117.410	FLEX SPINE 5,0X320 E/R BA
117.356	FLEX SPINE 3,5X250 F/R BAPL	117.411	FLEX SPINE 5,0X320 E/R BAP
117.357	FLEX SPINE 3,5X300 F/R BD	117.412	FLEX SPINE 5,0X320 E/R BAPL
117.358	FLEX SPINE 3,5X300 F/R BA	117.413	FLEX SPINE 5,0X360 E/R BD
117.359	FLEX SPINE 3,5X300 F/R BAP	117.414	FLEX SPINE 5,0X360 E/R BA
117.360	FLEX SPINE 3,5X300 F/R BAPL	117.415	FLEX SPINE 5,0X360 E/R BAP
117.361	FLEX SPINE 3,5X320 F/R BD	117.416	FLEX SPINE 5,0X360 E/R BAPL
117.362	FLEX SPINE 3,5X320 F/R BA	117.417	FLEX SPINE 3,5X250 L/R BD
117.363	FLEX SPINE 3,5X320 F/R BAP	117.418	FLEX SPINE 3,5X250 L/R BA
117.364	FLEX SPINE 3,5X320 F/R BAPL	117.419	FLEX SPINE 3,5X250 L/R BAP
117.365	FLEX SPINE 3,5X360 F/R BD	117.420	FLEX SPINE 3,5X250 L/R BAPL
117.366	FLEX SPINE 3,5X360 F/R BA	117.421	FLEX SPINE 3,5X300 L/R BD
117.367	FLEX SPINE 3,5X360 F/R BAP	117.422	FLEX SPINE 3,5X300 L/R BA
117.368	FLEX SPINE 3,5X360 F/R BAPL	117.423	FLEX SPINE 3,5X300 L/R BAP
117.369	FLEX SPINE 5,0X250 F/R BD	117.424	FLEX SPINE 3,5X300 L/R BAPL
117.370	FLEX SPINE 5,0X250 F/R BA	117.425	FLEX SPINE 3,5X320 L/R BD
117.371	FLEX SPINE 5,0X250 F/R BAP	117.426	FLEX SPINE 3,5X320 L/R BA
117.372	FLEX SPINE 5,0X250 F/R BAPL	117.427	FLEX SPINE 3,5X320 L/R BAP
117.373	FLEX SPINE 5,0X300 F/R BD	117.428	FLEX SPINE 3,5X320 L/R BAPL
117.374	FLEX SPINE 5,0X300 F/R BA	117.429	FLEX SPINE 3,5X360 L/R BD
117.375	FLEX SPINE 5,0X300 F/R BAP	117.430	FLEX SPINE 3,5X360 L/R BA
117.376	FLEX SPINE 5,0X300 F/R BAPL	117.431	FLEX SPINE 3,5X360 L/R BAP
117.377	FLEX SPINE 5,0X320 F/R BD	117.432	FLEX SPINE 3,5X360 L/R BAPL
117.378	FLEX SPINE 5,0X320 F/R BA	117.433	FLEX SPINE 5,0X250 L/R BD
117.379	FLEX SPINE 5,0X320 F/R BAP	117.434	FLEX SPINE 5,0X250 L/R BA

117.435	FLEX SPINE 5,0X250 L/R BAP	117.458	FLEX SPINE 3,5X320 ST/R BA
117.436	FLEX SPINE 5,0X250 L/R BAPL	117.459	FLEX SPINE 3,5X320 ST/R BAP
117.437	FLEX SPINE 5,0X300 L/R BD	117.460	FLEX SPINE 3,5X320 ST/R BAPL
117.438	FLEX SPINE 5,0X300 L/R BA	117.461	FLEX SPINE 3,5X360 ST/R BD
117.439	FLEX SPINE 5,0X300 L/R BAP	117.462	FLEX SPINE 3,5X360 ST/R BA
117.440	FLEX SPINE 5,0X300 L/R BAPL	117.463	FLEX SPINE 3,5X360 ST/R BAP
117.441	FLEX SPINE 5,0X320 L/R BD	117.464	FLEX SPINE 3,5X360 ST/R BAPL
117.442	FLEX SPINE 5,0X320 L/R BA	117.465	FLEX SPINE 5,0X250 ST/R BD
117.443	FLEX SPINE 5,0X320 L/R BAP	117.466	FLEX SPINE 5,0X250 ST/R BA
117.444	FLEX SPINE 5,0X320 L/R BAPL	117.467	FLEX SPINE 5,0X250 ST/R BAP
117.445	FLEX SPINE 5,0X360 L/R BD	117.468	FLEX SPINE 5,0X250 ST/R BAPL
117.446	FLEX SPINE 5,0X360 L/R BA	117.469	FLEX SPINE 5,0X300 ST/R BD
117.447	FLEX SPINE 5,0X360 L/R BAP	117.470	FLEX SPINE 5,0X300 ST/R BA
117.448	FLEX SPINE 5,0X360 L/R BAPL	117.471	FLEX SPINE 5,0X300 ST/R BAP
117.449	FLEX SPINE 3,5X250 ST/R BD	117.472	FLEX SPINE 5,0X300 ST/R BAPL
117.450	FLEX SPINE 3,5X250 ST/R BA	117.473	FLEX SPINE 5,0X320 ST/R BD
117.451	FLEX SPINE 3,5X250 ST/R BAP	117.474	FLEX SPINE 5,0X320 ST/R BA
117.452	FLEX SPINE 3,5X250 ST/R BAPL	117.475	FLEX SPINE 5,0X320 ST/R BAP
117.453	FLEX SPINE 3,5X300 ST/R BD	117.476	FLEX SPINE 5,0X320 ST/R BAPL
117.454	FLEX SPINE 3,5X300 ST/R BA	117.477	FLEX SPINE 5,0X360 ST/R BD
117.455	FLEX SPINE 3,5X300 ST/R BAP	117.478	FLEX SPINE 5,0X360 ST/R BA
117.456	FLEX SPINE 3,5X300 ST/R BAPL	117.479	FLEX SPINE 5,0X360 ST/R BAP
117.457	FLEX SPINE 3,5X320 ST/R BD	117.480	FLEX SPINE 5,0X360 ST/R BAPL